


# Hůl berlová stavitelná

PN 0800/E/12

LYRA

## 1. Použití výrobku

Hůl se používá v případech, kdy je dostačující pouze mírné jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážné zatížení vzpěrem. Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

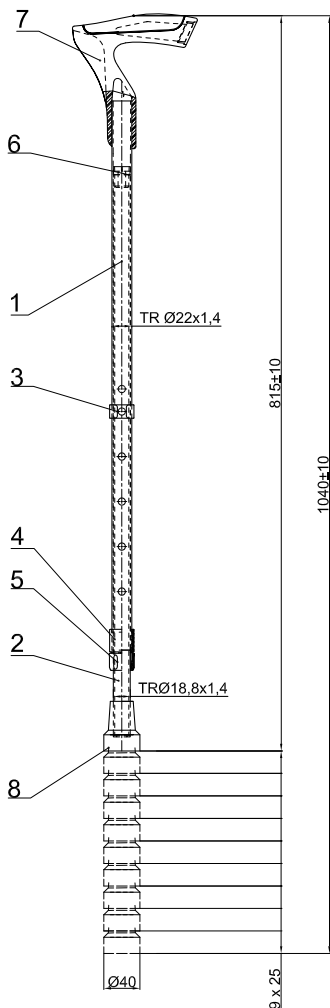

Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 130 kg!

## 2. Popis výrobku

Hůl berlová stavitelná LYRA má tyto hlavní části:

1. nosník
2. nástavec
3. třmen s kolíkem
4. pouzdro
5. závitová matice
6. vymežovací vložka
7. rukojeť s měkčením
8. násadec

Rukojeť z polypropylenu s měkčením z TPE SANTOPRENE má ve spodní části vsazen nosník. Na dolní konec nosníku je pevně nasunuto pouzdro s maticí a suvně uložen nástavec. Nástavec umožňuje krokové nastavení délky hole po 25 mm s možností nastavení 10 délek berle. Poloha nástavce je zajištěna třmenem s kolíkem a pojištěna dotažením matice pouzdra. Nástavec je ukončen násadcem.

## 3. Hmotnost

Hmotnost hole LYRA

cca 480 g ± 5 %

## 4. Rozměry

Délka hole minimální:

815 ± 10 mm

Délka hole maximální:

1 040 ± 10 mm

 ERILENS s.r.o.

Papirenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA  
tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz



## 5. Nastavení délky hole

- nejprve se povolí závitová matice (5)
- vyjme se třmen s kolíkem (3)
- vysune se nástavec (2) na potřebnou výšku
- zpfesní se poloha otvorů v nosníku a nástavci
- zasune se zpět třmen s kolíkem (3)
- utáhne se závitová matice (5)

## 6. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů hole. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání. K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha.

**Nesmí být použito organických rozpouštědel.**

## 7. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

# ZÁRUČNÍ LIST

**VÝROBCE:** ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

**VÝROBEK:** HŮL BERLOVÁ STAVITELNÁ

**TYP:** LYRA

**ČÍSLO PN:** 0800/E/12

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení hole způsobené jejím obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb. Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

**ZNAČKA KONTROLY:**



**DATUM PRODEJE:** .....



**RAZÍTKO PRODEJNY**



**ERILENS s.r.o.**

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA

tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz

