

# protect. CAT Walker

## Bércová ortéza pro imobilizaci

### Indikace

- Pooperačně (ruptura Achillovy šlachy, poranění vazů, měkkých částí a šlach)
- Konzervativně (metatarzální fraktury, poranění Achillovy šlachy, těžké distorze)
- Stabilní fraktury nohy a kloubů, dodatečná léčba fraktur (talus, luxace horního hlezenního kloubu)
- Po refixacích vazů

### Kontraindikace

- Nestabilní fraktury nebo fraktury proximální kosti holenní nebo kosti lýtkové
- Defekty měkkých částí a rovněž porucha procesu hojení ran
- Existující problémy s lymfatickým systémem

### Upozornění

Ortéza protect.CAT Walker není vhodná pro pacienty s tělesnou hmotností nad 120 kg.

### Návod k nasazení

- Otevřete popruhy, uvolněte přední dlahu z vnitřní boty a následně sejměte vnitřní botu z konstrukce.
- (obr. 1) Uvolněte pásky na suchý zip a otevřete horní i dolní část vnitřní boty. Poproste nyní pacienta, aby vložil své chodidlo a část nohy pod kolenem do vnitřní boty. Dbejte na to, aby byly vzduchové komory prázdné!

- (obr. 2) Nyní vnitřní botu uzavřete a zajistěte, aby pevně přiléhala k pacientově noze. Vnitřní botu nasměrujte tak, aby se integrovaná pumpa nacházela uprostřed a později pasovala do vyhrazené mezery v dlaze.
- (obr. 3) Požádejte pacienta, aby svou nohu postavil do skořepiny ortézy. Podkolenní část nohy a chodidlo musejí zaujmout takovou pozici, aby přesně zapadly do skořepiny.
- (obr. 4) Nyní vyzkoušejte správnou polohu a usazení nohy v ortéze. Dbejte na to, aby prsty pacienta nenarážely do ochrany prstů. V případě potřeby lze polohu ochrany prstů změnit nebo ji zcela odstranit.
- (obr. 5) Volnou dlahu nyní přiložte zepředu na holeň a dolní část nohy pacienta. Ujistěte se, že pumpa a ventil pasují do vyhrazené mezery.
- (obr. 6) Pro stabilizaci systému zapněte popruhy. Začněte s popruhem na dolní části nohy a postupně zapněte všechny ostatní popruhy. Popruhy by měly pevně přiléhat. Přebytečný materiál lze odstříhnout.
- Požádejte pacienta, aby se v ortéze prošel. Tím se ujistíte, že konstrukce ortézy je nasazena správně.
- (obr. 7) Pozici konstrukce ortézy ustálíte nafouknutím vzduchových polštářů pomocí pumpy. Pomocí ventilu lze regulovat plnění nebo odpouštění vzduchu. Polštářové díly lze použít k dodatečnému vyplstrování.

---

**Pokyny k praní**

Perte ručně ve slabém a studeném mýdlovém roztoku. Důkladně vymáchejte. Neždímejte. Výrobek nelze bělit. Sušte na vzduchu, nikoli v sušičce. Nežehlete. Skvrny odstraňte benzínem nebo chemickými čistícími prostředky. Zbytky mýdla mohou vyvolat podráždění pokožky nebo opotřebení materiálu.



---

**Pokyny pro skladování**

Ortézou skladujte v suchu a chraňte ji před přímým slunečním zářením.

---

**Složení materiálu**

PP, PU, EVA, polyester

**Záruka**

je v rámci zákonných ustanovení.