

protect.Co

Informace o účelu použití

Výrobek protect.Co je měkká ortéza kolena s omezením extenze a flexe. Výrobek je určen výhradně k ortotické terapii kolena, pokožka v oblasti přiložení ortézy nesmí být poškozena nebo poraněná.

Indikace

- Ke konzervativní léčbě poranění postranních vazů
- Lehčí nestability zkřížených vazů
- Poškození menisku
- Chronické nestability
- Traumatické nebo degenerativní změny kolenního kloubu

Kontraindikace

V současné době nejsou žádné známé.

Nastavení flexe a extenze

Extenční omezovací klíny (omezení natažení): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Flekční omezovací klíny (omezení ohybu): 0°, 60°, 75°, 90°

Možnost znehybnění při: 0°

Mediální (vnitřní strana) a laterální (vnější strana) nastavení musí být vždy stejné.

1. V kolenní ortéze jsou již nainstalovány extenční klíny 10°.
2. Při výměně stříbrného extenčního klínu vyšroubujte šroub a klín vytáhněte směrem dopředu. Nový klín pro výměnu najdete v sadě klínů, které jsou označeny natištěným údajem o stupních. Nový extenční klín zasuňte zepředu do kloubu. Nyní našroubujte šroub do závitu a utáhněte jej.
3. Flekční klíny se instalují zezadu. Vyberte ze sady klínů vhodný flekční klín s příslušným údajem o stupních. Klín vložte a utáhněte šroub.

4. Proveďte několik pohybů kloubem ortézy a zkontrolujte polohu klínů. Nakonec připevněte na kloub kryt.

Důležité upozornění

Extenční a flekční nastavení měňte pouze podle pokynů svého ošetřujícího lékaře. Aby nemohlo dojít k hyperextenzi, musí být do ortézy vloženy extenční klíny nebo klíny 0°. Klíny nastavují přesný pohybový rádius ortézy. V případě obtížných poměrů měkkých tkání může být v závislosti na kompresi měkkých tkání nutné vložit větší klín, aby se pohyb kolena omezil na požadovaný rádius. Pozornost věnujte správné poloze kloubů ortézy: střed kloubů by měl spočívat ve výši horní hrany pately. Kloub musí být umístěn za boční středovou linií dolní končetiny.

Návod k obleaění

- Otevřete oba popruhy a oba pásy na suchý zip.
- Ohněte nohu do úhlu cca 45°. Oviňte ortézu zezadu těsně kolem nohy a zapněte oba suché zipy (obr. 1).
- Dbejte na to, aby se kolenní česka nacházela uprostřed české mezery. Středy kloubů ortézy by se měly nacházet ve výši horní hrany kolenní český a těsně za postranní středovou linií nohy (obr. 2).
- Nejprve zapněte dolní holenní pás (obr. 3), poté horní stehenní pás (obr. 4).
- Poté pás uzavřete přímo pod kolenní českou (obr. 5).
- Na závěr ještě uzavřete zbývající dolní stehenní pás (obr. 6).
- Pokud je to možné, ujděte několik kroků a znovu zkontrolujte správnou pozici ortézy (obr. 7). Případně upravte pozici ortézy na noze.

Pokyny k praní

Před praním uzavřete pásky na suchý zip a odstraňte dlahy kloubu. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebením materiálů.

- Výrobek perte v ruce a nejlépe za použití pracího prostředku medi clean.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit.



Pokyny pro skladování

Výrobku skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními paprsky.

Materiálové složení

Polyamid, elastan, hliník, PU, polyester

Záruka

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.