

protect. Walker boot protect.AIR Walker boot protect.Walker boot short

Informace o účelu použití

Výrobek protect.ROM Walker / protect. Air ROM Walker je ortéza bérce. Výrobek je určen výhradně k ortotické terapii nohy, pokožka v oblasti přiložení ortézy nesmí být poškozena nebo poraněná.

Indikace

- Zranění nebo operace nohy a prstů
- Vymknutí kloubu nohy 2. nebo 3. stupně
- Stabilní nebo vnitřně fixované fraktury nohy nebo kloubu nohy

Kontraindikace

Neuvádějí se u nestabilních fraktur nebo fraktur proximální holenní kosti nebo lýtkové kosti.

Upozornění

- NEODSTRAŇUJTE plastové obaly, které se nacházejí na dlahách!
Tyto plastové obaly musejí zůstat na dlahách během první fáze procesu nastavení.
- Ortéza protect.Walker boot nebyla vyvinuta ani není určena pro pacienty s hmotností přes 110 kg.

Návod k nasazení

- Otevřete všechny popruhy a vyjměte z ortézy vnitřní botu z pěnové hmoty.
- (Obr. 1) Uvolněte pásky na suchý zip a otevřete horní i dolní část vnitřní boty.

Poproste nyní pacienta, aby vložil své chodidlo a část nohy pod koleno do vnitřní boty.

- (Obr. 2) Nyní botu uzavřete a zajistěte, aby pěnová hmota pevně přiléhala k pacientově noze.
- (Obr. 3) Ujistěte se, že plastové obaly stále zcela překrývají pásek suchého zipu na vnitřních stranách dlah. Požádejte pacienta, aby se postavil nohou do plastové konstrukce mezi obě stabilizační tyče. Noha by měla být v takové pozici, aby byly obě dlahy centrovány vždy na středové ose po straně nohy.
- Aby se dosáhlo optimálního přizpůsobení ortézy a pevné pozice po stranách lýtky, lze dlahy nahnout. Navíc je možné na vnitřní strany dlah (ve výšce kotníku) umístit pohodlné polštářky. Pro úpravu mediální nebo laterální vzdálenosti mezi dlahou a nohou lze tyto polštářky lze posouvat nebo odstranit.
- (Obr. 4) Pokud jste se ujistili, že dlahy jsou správně upravené a mají správnou orientaci (středová osa po stranách nohy), pak můžete z dlah odstranit plastové obaly. Vnitřní bota z pěnové hmoty se v té chvíli zafixuje pomocí pásku suchého zipu, který je umístěn na vnitřní straně stabilizačních dlah.
- (Obr. 5) Nyní uzavřete oba nártní popruhy, které drží nohu pacienta ve vnitřní botě. Popruhy by měly pevně přiléhat, lze je však otevřením a uzavřením pásku na suchý zip individuálně nastavit. Přebytečný materiál se dá také odstříhnout.
- (Obr. 6) Nyní uzavřete tři popruhy, které drží lýtkovou část nohy mezi dlahami.
Začněte s popruhem, který je nejbližší kloubu nohy. Všechny tři popruhy by měly být pevně přitaženy.
- Požádejte pacienta, aby se v ortéze prošel. Tím se ujistíte, že konstrukce

ortézy je nasazena správně.

protect.Air Walker boot

Pro nafouknutí vnitřní boty uzavřete ventil a pumpujte (mačkejte pumpu) tak dlouho, dokud není v botě požadované množství vzduchu. Pro vypuštění vzduchu ventil jednoduše otevřete.

Sejmutí ortézy

Pokud je pacientovi dovoleno ortézu během léčby sejmout nebo pokud se ortéza odstraňuje z důvodů vyšetření, nejprve se povolí pásky a otevře se suchý zip na polstrování, aby mohl pacient z ortézy vystoupit. Přitom se musí vnitřní polstrování stále ještě nacházet ve své poloze mezi kolejkami ortézy protect.Walker boot. To pacientovi dovoluje nasadit si ortézu a polstrování na dolní končetinu opět ve správné poloze.

Pokyny k praní

Pásky na suchý zip před praním zapněte. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu.

- Měkké polstrování perte v ruce a nejlépe za použití pracího prostředku medi clean.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit.



Pokyny ke skladování

Ortézu skladujte na suchém místě a chráňte ji před přímým slunečním zářením.

Materiálové složení

Polyester, nylon, PU pěna, skelná vlákna, polyamid, hliník

Záruka

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.