

MAXI ARMOR - Ochranná bota k fixacím

Nastavitelná, vzdušná konstrukce přední části boty umožňuje snadné nasazení a poskytuje dobrou ventilaci. Ochranná bota je upevněna pomocí 2 širších pásek na suchý zip tak, aby byla schopna se přizpůsobit individuálním potřebám uživatele a aby bylo možné ji použít pro různé typy a velikosti fixací a sádry.

Protiskluzová podešev zajišťuje stabilní přilnavost k podlaze. Boty lze používat jak uvnitř, tak venku. Ochranná bota k fixacím je vyrobená z ekologicky šetrné EVO pěny. Umožňuje snadné čištění a rychlé sušení.

Botu lze použít jak na levou tak na pravou nohu.

Indikace:

- po chirurgickém zákroku
- při sádrových a jiných fixacích
- při edémech různého původu, kdy pacient nemůže používat normální obuv



Upozornění!

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům se sensorickými poruchami v oblasti chodidla.

Před použitím boty se poradte se svým ošetřujícím lékařem.

Nepoužívejte na kluzké podlaze, např. mramor. Buďte opatrní na dlaždicích, doporučujeme použití spolu s berlemi. Pomůcku udržujte suchou. Nepoužívejte na mokré podlaze.

Udržujte v pokojové teplotě pod 40°C.


Materiál: EVA pěna

Obsah balení: 1 kus

Čištění:

Použijte vlhký hadřík s jemným mycím prostředkem, např. mýdlem. Nepoužívat bělidlo. Pouze ruční mytí, neprát v pračce.

Způsob použití:

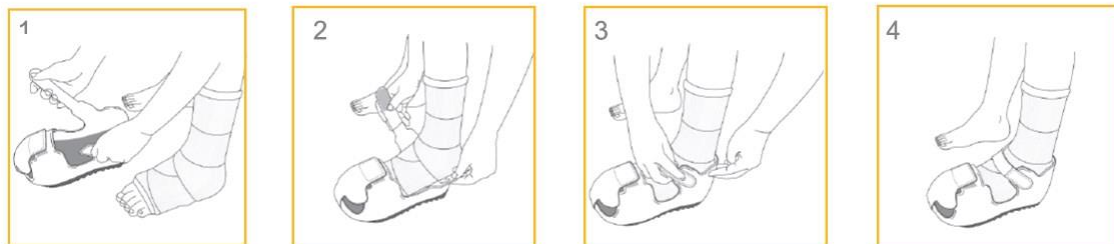

1. Odepnout kotníkový pásek.
2. Vložit chodidlo s fixací.
3. Zapnout kotníkový pásek.
4. Dle potřeby utáhnout přední pásek.

Označení: MXFK

Velikosti:

Velikost	S	M	L	XL
Vnitřní délka	21,8 cm	24,4 cm	27,7 cm	28,9 cm

Vydání: 07-2017

VÝROBCE

Hanul Trading Company
30-2, Ogeum-ro 21-Gil,
Songpa-Gu, Seoul, 05632 Korea

DISTRIBUTOR

mdh sp. z o.o.
ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
Poland
www.mdhprofilaktyka.pl

DISTRIBUTOR v ČR

MEYRA ČR s. r. o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

