

## Sedačka do vany

Model 2016: 3016742 / 3016752 / 3016762

### Montáž / Návod k použití



### Úvod

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a dbejte pokynů. Děti a mladiství by si měli tento dokument před prvním použitím přečíst s rodiči nebo opatrovníkem.

Tento návod k obsluze je pro vás pomůckou, s jejíž pomocí se seznámíte s manipulací s výrobkem tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání.

Tento výrobek je technická pomůcka. Je nutné se s ním seznámit, vyžaduje pravidelnou údržbu a při nesprávném používání může být nebezpečný. Proto je nutné se seznámit se správným zacházením výrobku.

Pro dotazy se obraťte na odborného prodejce.

Výrobek splňuje požadavky EN 12182 Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Zahrnuje požadavky na hořlavost použitých čalouněných materiálů a případně plastů v souladu s EN 1021-2.

### Popis

Sedačky do vany s protiskluzovými gumovými koncovkami jsou nastavitelné pro běžně prodejné šířky van.

Pro čištění je možné sedací plochu s hygienickým otvorem i opěrku odebrat směrem nahoru.

### Použití

Při alergické reakci, zčervenání kůže a/nebo otlaku při použití výrobku je nutné neprodleně vyhledat lékaře.

Tento výrobek slouží osobám s omezenou pohyblivostí k ulehčení procesu koupání.

### Kontrola při převzetí

Všechny výrobky jsou u nás kontrolovány na bezchybnost a zabaleny do speciálních krabic.

Chceme Vás ale poprosit, zkontrolujte výrobek okamžitě po dodání – nejlépe v přítomnosti dodavatele – na případné poškození při přepravě.

Obal by měl být uložen pro další případnou přepravu.

### Životnost

U tohoto výrobku vycházíme z předpokládané průměrné životnosti 4 let, při předpokladu správného zacházení a dodržení pokynů údržby a kontrol.

Životnost výrobku je rovněž závislá na četnosti používání, okolí používání a ošetřování.

Díky použití náhradních dílů lze životnost výrobku prodloužit. Náhradní díly jsou zpravidla dostupné až 5 let po ukončení výroby.

Uvedená životnost nepředstavuje žádnou dodatečnou záruku.

### Obsah dodávky

#### Sedačka do vany:

- 1x Sedací deska
- 1x Boční rám pravý
- 1x Boční rám levý
- 1x Spojovací trubka přední

1x Spojovací trubka zadní  
1x Návod k použití / montáž  
Sedačka do vany s opěrkou:

1x Sedačka do vany  
1x Zádová trubka pravá  
1x Zádová trubka levá  
1x Opěrka  
4x Spojovací materiál  
1x Návod k použití / montáž  
Otočná sedačka do vany:

1x Sedací deska  
1x Boční rám pravý  
1x Boční rám levý  
1x Opěrka  
1x Sedací rám  
1x Rám sedačky  
1x Návod k použití / montáž

## Montáž

Provedení následující montáže doporučujeme od odborného prodejce.

### Bezpečnostní pokyny

Během celé montáže dejte pozor na místa sevření – nebezpečí skřípnutí!

Udržujte pracovní místo během montáže čisté!

### Sedačka do vany

1. Povolte upínací šrouby.
2. Boční rámy vysuňte na šířku vany na obou stranách stejně. Minimální plocha opěrná (nosná) plocha musí být 5 cm.
3. Utáhněte upínací šrouby.
4. Sedací desku přitlačte pevně na spojovací trubky.

### Sedačka do vany s opěrkou

1. Nejdříve proveďte vše podle bodu 1.-4. v odstavci „Sedačka do vany“.
2. Připevněte opěrku – zádové trubky umístěte zepředu na držáky a upevněte šroubení. Při tom je třeba přitáhnout matky zevnitř.
3. Nasuňte opěrku na doraz na zádové trubky.

### Otočná sedačka do vany

1. Nejdříve proveďte vše podle bodu 1.-4. v odstavci „Sedačka do vany“.

2. Poté nasadte opěrku na doraz na zádové trubky.
3. Zkontrolujte funkci otáčení a aretování sedačky!

## Návod k použití

### Bezpečnostní pokyny

Před každým použitím se přesvědčte o použitelnosti výrobku – nebezpečí úrazu!

Zdeformovanou sedačku do vany nenarovnávejte a nepoužívejte – nebezpečí úrazu!

Dbejte na to, aby opěrné plošky byly správně nastaveny na šířku vany, tzn. gumové koncovky musí plně a bezpečně ležet na okraji vany!

Gumové koncovky jakožto i okraj vany je třeba udržovat bez přítomnosti mýdlových zbytků – nebezpečí uklouznutí!

Udržujte gumové koncovky a okraje vany bez přítomnosti zbytků olejů a tuků – nebezpečí uklouznutí!

Opatřené nebo poškozené gumové koncovky musí být bezodkladně obnoveny – nebezpečí úrazu!

Sedejte si vždy na střed sedací desky!

Nestoupejte nohama na sedací plochu – nebezpečí pádu!

Opírejte se pouze svisle o obě opěrky sedačky do vany – nebezpečí úrazu!

Neopírejte se při vstupu nebo výstupu do/z vany o opěrné plošky.

Zkontrolujte, zda se sedák bez potíží otáčí a aretuje ve 4 pozicích (kroky po 90°) s pomocí seřizovací páčky.

Při bočním zvednutí nebo přenosu otočné sedačky do vany se může seřizovací páčka volně pohybovat – nebezpečí úrazu nechtěnými rotačními pohyby otočné sedačky resp. rámu sedačky.

Po provedení čištění zkontrolujte všechny součásti a správnou funkčnost.

Společnost MEYRA nemůže být ve smyslu odpovědnosti za výrobek zodpovědná za škody nebo rizika, které jsou způsobeny dětmi bez dozoru ve spojitosti s výrobkem.

## Otočná sedačka do vany

1. Pro vstup (pokud je to nutné) otočte otočnou sedačku přes okraj vany. K provedení použijte seřizovací páčku.
2. Nejdříve se oběma rukama pevně přidržete opěrek a poté si sedněte dozadu do středu sedací desky.
3. Použijte seřizovací páčku a otočte své tělo podél směrem k vaně, až zapadne aretování. Přitom zvedněte nohy.
4. Pro výstup postupujte v opačném směru návodu. Vždy zkontrolujte a zabezpečte správnou aretaci otočné sedačky.

## Čištění

K čištění používejte nejlépe mýdlový roztok. Čisticí prostředek by měl v každém případě mít hodnotu pH min. 6 (neutrální čistič). K čištění nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

## Dezinfekce

Pokud je výrobek používán více osobami (např. v pečovatelském domě), je předepsáno používání běžně dostupných dezinfekčních prostředků. Před dezinfekcí výrobek očistěte.

Dezinfekce stíráním nebo rozprašovací je přípustná pouze kontrolovanými a bezpečnými dezinfekčními prostředky.


Seznam kontrolovaných a bezpečných dezinfekčních prostředků a jejich používání vystavený Institutem Roberta Kocha najdete na [www.rki.de](http://www.rki.de).

Při používání dezinfekčních prostředků mohou být plochy ovlivněny aplikací, což může omezit dlouhodobou funkčnost komponent. Dbejte proto na výrobcem předepsané doporučení použití.

## Opravy

Používejte výhradně originální náhradní díly. Využijte servisních nabídek Vašeho odborného prodejce.

## Likvidace

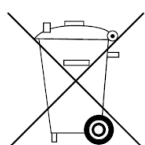

Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.

Informujte se na úřadu na místní sběrný dvůr.

## Údržba

Chybná nebo zanedbaná péče a údržba výrobku může vést k omezení odpovědnosti výrobce.

### Práce údržby

Následující plán údržby představuje průvodce pro provádění údržbových prací.

Neexistuje žádný výklad pro skutečně nutný, pro výrobek stanovený objem prací.

Plán údržbových prací viz strana 5.

## Technické údaje

### Model: Sedačka do vany 3016742

Délka .....	40 cm
Šířka .....	71-89 cm
Výška .....	23,5 cm
Sedací plocha .....	40x40 cm
Max. zatížení .....	120 kg
Hmotnost .....	2,5 kg
Max. teplota vody k čištění .....	80°C
Barva .....	bílá
Štítek .....	na sedací trubce


### Model: Sedačka do vany s opěrkou 3016752

Délka .....	44 cm
Šířka .....	71-89 cm
Výška .....	36 cm
Sedací plocha .....	40x40 cm
Výška opěrky .....	33 cm
Max. zatížení .....	120 kg
Hmotnost .....	3 kg
Max. teplota vody k čištění .....	80°C
Barva .....	bílá
Štítek .....	na sedací trubce

### Model: Otočná sedačka do vany 3016762

Délka .....	57 cm
Šířka .....	71-89 cm
Výška .....	51 cm
Sedací plocha .....	40x40 cm
Výška opěrky .....	37,5 cm
Max. zatížení .....	120 kg
Hmotnost .....	6,5 kg
Max. teplota vody k čištění .....	80°C
Barva .....	bílá
Štítek .....	na sedací trubce

## Význam symbolů na výrobku

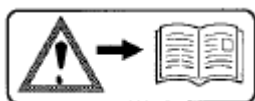

Přečtěte návod k použití a ostatní přiloženou dokumentaci.



Upozornění na nebezpečí skřípnutí. – Nesahejte tam.

## Význam symbolů na štítku



Výrobce



Objednací číslo



Sériové číslo



Datum výroby (rok – kalendářní týden)



Přípustná hmotnost uživatele



Přípustná celková hmotnost

## Záruka

Na tento produkt přebíráme v rámci našich všeobecných obchodních podmínek zákonnou záruku a případně zřejmé resp. sjednané záruky. Pro záruční plnění resp. záruční nároky prosím obraťte na stránku s oddílem pro vyplnění údajů o modelu, číslu dodacího listu s datem, sériové číslo (SN) a předejte vyplněné Vašemu odbornému prodejci.

Sériové číslo (SN) vyčtete ze štítku.

Předpoklad pro uplatnění záručního plnění resp. záručních nároků je v každém případě správné používání výrobku, použití originálních náhradních dílů od odborného prodejce jakožto i pravidelné provádění údržby a kontrol.

Záruku nelze uplatnit na poškození povrchu, poškození obutí kol, poškození díky uvolněným šroubům nebo matic jakožto i vychýlené montážní otvory díky častým úpravám.

Dále jsou vyloučeny škody na pohonu a elektronice, které byly zapříčiněny neodborným čištěním přístrojem s parními tryskami resp. úmyslným nebo neúmyslným namočením komponentů.

Rušení ze zdrojů záření, jako jsou mobilní telefony s vysokým vysílacím výkonem, hi-fi systémy a další silné zdroje rušení mimo standardní specifikace, nelze uplatnit jako záruční plnění nebo záruční nároky.

### Pozor:

Nedodržování návodu k použití jakožto i neodborně provedené opravy a také zvláštní technické změny a úpravy bez souhlasu vedou k zániku jak záručního plnění resp. záručního nároku, tak také k zániku odpovědnosti za výrobek obecně.

### Upozornění:

Tento návod k použití jako součást výrobku musí být předán uživateli a při další změně uživatele.

Technické změny ve smyslu pokroku si vyhrazujeme.



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

## Výrobce

MEYRA GmbH  
Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal-Kalldorf  
www.meyra.de

## Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4  
tel.: 272 761 102  
e-mail: meyra@meyra.cz  
www.meyra.cz

## Záruční list / Záruka

Prosím vyplňte! V případě potřeby zkopírujte a kopii pošlete Vašemu odbornému prodejci.

<h1>Záruční list / Záruka</h1>	
model:	číslo dodacího listu:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
SN (viz štítek):	datum dodání:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Razítko odborného prodejce:	
<input type="text"/>	

## Plán údržby

KDY	CO	POZNÁMKA
Před použitím	Zkontrolovat zda nejsou poškozené zádové a/nebo rámové trubky.	Kontrolu provede sám uživatel nebo ošetřovatel.  Při deformaci nebo popraskání ve sváru kontaktujte ohledně opravy odborný servis. – Nebezpečí úrazu!
Před použitím	Zkontrolovat zda není poškozená sedací deska a/nebo opěrka.	Kontrolu provede sám uživatel nebo ošetřovatel.  Při deformaci nebo popraskání ve sváru kontaktujte ohledně opravy odborný servis. – Nebezpečí úrazu!
Po použití	Čištění	Čištění provede sám uživatel nebo ošetřovatel.
Každých 6 měsíců (podle četnosti používání)	Zkontrolovat zda nejsou poškozeny gumové koncovky a zda pevně drží spojovací materiál.	Kontrolu provede sám uživatel nebo ošetřovatel.
Doporučení výrobce: Každých 12 měsíců (podle četnosti používání)	Kontrola bezpečnosti	Kontrolu provede odborník.