

# NÁVOD K POUŽITÍ

VYMĚKČENÝ NÁSTAVEC NA WC

# 508 SUPER



CE

## POUŽITÍ

Nástavce na WC jsou součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko pádu při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

## POPIS

Nástavec je vyroben z PU pěny. Typ 508 se nasazuje na mísu a proti nechtěnému pohybu je zajištěn vymešovými výlisky na spodním okraji nástavce. Typ 508 Super je zabezpečení maximální stability, ve spodní části vybaven navíc dvěma vymešovými patkami, které fixují polohu nástavce proti posunutí. K nastavení bočních vymešovacích patek slouží jistící šrouby.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním nástavce si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním nástavce konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Nástavec nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 120 kg.

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 100 kg.

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jistících prvků.

## OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části nástavce, tj. nástavec a aretační šrouby s patkami.

## PŘIPEVNĚNÍ NÁSTAVCE

Nasadte nástavec na mísu tak, aby byl v co nejtěsnějším kontaktu s mísou a nedocházelo k posunu nástavce. Pro fixaci této polohy u modelu 508 SUPER navíc dotáhněte ještě šrouby (A) ve směru hodinových ručiček boční vymešovací patky (B), aby se nástavec nemohl posunout.

## POZOR

Vymešovací patky mohou být před prvním použitím zajištěny v transportní poloze, proto je nutné takto uložené patky otočit (viz obr) ještě před nastavením požadované polohy. Jsou-li přiloženy volně, zašroubujte podle obrázku.

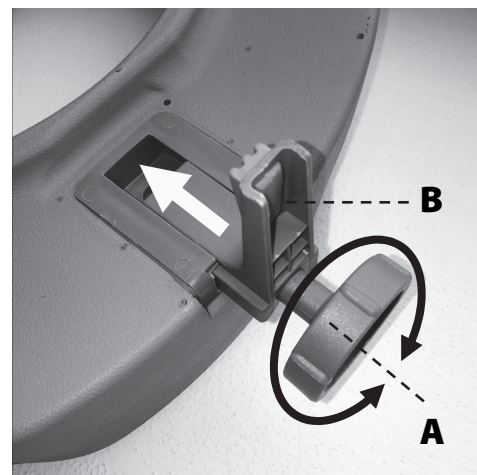

## ÚDRŽBA

Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.