

Dlahy univerzální pro fixaci palce a prstů ruky Handicap

PN 0221/HT/08

J

Popis výrobku

Dlahy J pro fixaci palce a prstů ruky má tyto hlavní části:

1. vlastní dlahy
2. výstelka


Dlahy je vyrobena z hliníkového plechu, opatřena polyetylenovou výstelkou a tvarována tak, aby dostatečně kryla vnější a vnitřní části článků prstů ruky, případně jejich klouby. Dlahy je možno dle účelu použití dotvarovat. Dlahy se vyrábí v jedné velikosti a v jednom provedení.

Rozměry

viz. obrázek

Hmotnost

12 g ± 3 %

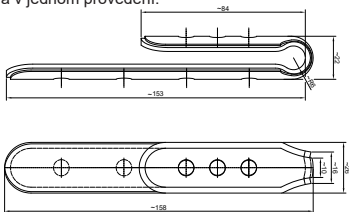

Určený účel

Dlahy se používá při ošetření poranění v oblasti prvního až třetího článku prstů ruky spolu se základním kloubem. Dlahou lze fixovat základní kloub palce a druhý článek palce ruky.

Dlahy lze použít volárně i dorsálně u prstů ruky s výjimkou palce. Dlahy lze také použít při ošetření citlivých řezných poranění, zhmožděnin, poranění nehtu, při rupturách natahovačů prstů, distorzi kloubů, doléčení po zlomeninách a operacích na kostech prstů ruky.

Vlastnosti z hlediska účinnosti

Fixuje a stabilizuje první až třetí článek prstů ruky při různých pourazových stavech.

Indikace

Nutnost fixace nebo stabilizace prvního až třetího článku prstů ruky při pourazových stavech.

Doléčení a zklidnění poranění základního kloubu palce ruky.

Kontraindikace

Těžké degenerativní změny v oblasti prstů a palce ruky vylučující použití dlahy.

Zbytkové riziko

Není známo.

 Handicap trade s.r.o.

Bystrcká 15, 624 00 Bmo, ČESKÁ REPUBLIKA
e-mail: info@berle.cz www.berle.cz



handicap
TRADE
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Cílová skupina

Pacienti s výše uvedenou indikací poučení odborníky z daného klinického oboru.

Upozornění pro pacienta



- Dlahu používejte pouze pro určený účel.
- **Dlahu je nesterilní a je určena pro jedno použití!!**
- Při opakovaném použití hrozí riziko neschopnosti dodržet hygienickou bezpečnost a možnosti vzniku infekce.
- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.



Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho

pacienta  a nesmí být použit opakovaně .

Skladujte na suchém místě , chráněném před slunečním zářením .

ZÁRUČNÍ LIST



VÝROBCE: Handicap trade s.r.o.
Bystrcká 612/15, 624 00 Brno

VÝROBEK: Dlahu pro fixaci prstů ruky

TYP: J

ČÍSLO PN: 0221/HT/08

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení dlahy způsobené jejím obvyklým užíváním. Reklamace se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

DATUM PRODEJE:



RAZÍTKO PRODEJNY

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 01.12.2021

