

Berle francouzská měkčená VERA Handicap

Popis výrobku

Berle francouzská měkčená VERA Handicap má tyto části:

- monoblok (loketní opěrka s vyměkčeným držadlem)
- nosník
- nástavec
- třmen s kolíkem
- pouzdro s maticí
- vymezovací vložka
- násadec
- odrazka

Berli je možné nastavit v 10 výškách s odstupňováním po 25 mm.



Rozměry

Délka berle min.:	970 ± 10 mm
Délka berle max.:	1 195 ± 10 mm
Vzdálenost držadla od lok. opěrky:	235 ± 2 mm
Vzdálenost držadla od země min.:	765 ± 10 mm
Vzdálenost držadla od země max.:	990 ± 10 mm

Nastavení délky berle

Při nastavování berle na potřebnou výšku se postupuje následujícím způsobem:

- uvolní se pojistná matice otáčením proti směru hodinových ručiček (1)
- vyjme se třmen s kolíkem (2)
- dolní nástavec se vysune na přibližně potřebnou výšku (3), přesná výška se nastaví vybráním jednoho ze dvou otvorů v dolním nástavci
- zpřesní se poloha otvorů nosníku dolního nástavce a zasune se třmen s kolíkem (4)
- provede se pojištění nastavené délky dotažením pojistné matice otáčením ve směru hodinových ručiček (5)

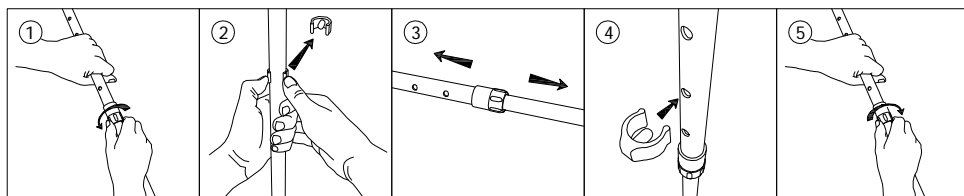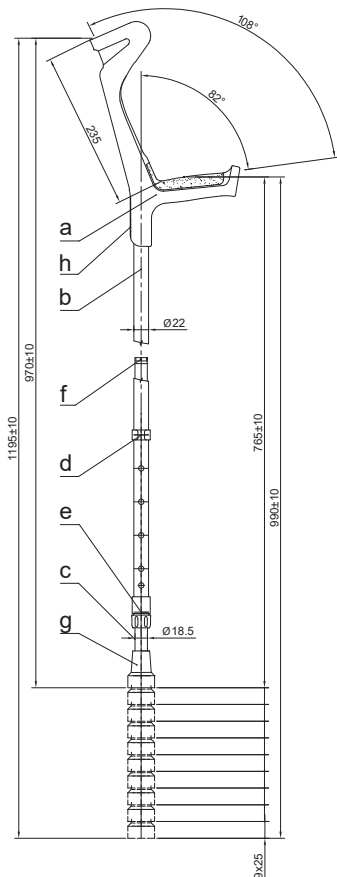

Hmotnost

cca 600 g ± 3%

Určený účel

Berle francouzská měkčená VERA Handicap je určena k odlehčení dolní končetiny a/nebo zajištění stability při nemožnosti užití standardní bipedální lokomoce.

Vlastnosti z hlediska účinnosti

Odlehčuje dolní končetinu a zajišťuje stabilitu při různých pózových, pooperačních nebo degenerativních stavech.

Indikace

- Nutnost trvalého či dočasného odlehčení váhy nesené dolními končetinami při různých poúrazových, pooperačních či degenerativních stavech s přítomnou dostatečnou silou a koordinace horní části těla k opoře a pohybu vlastní tělesné hmotnosti.
- Doléčení stavů po distorzích, kontuzích v oblasti dolní končetiny.

Kontraindikace

- Těžké degenerativní či potraumatické změny v oblasti horní končetiny přebírající nosnou funkci za dolní končetiny (zejména pak ramenního či zápěstního kloubu) vylučující použití berlí.
- Nedostatečná síla či koordinace horní části těla umožňující pohyb či oporu váhy vlastního těla.

Zbytkové riziko

Není známo.

Cílová skupina

Pacienti s výše uvedenou indikací poučení odborníky z daného klinického oboru.




Upozornění pro pacienta

- Berli používejte pouze pro určený účel. Berle je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze (tj. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi) pro převážné zatížení vzpěrem. Berle není konstruována pro vyšší zatížení ohybem, tj. v úhlu přesahujícím 30° od svislé polohy.
- **Berle je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 150 kg!**
- Přibližně po 1 měsíci užívání proveďte kontrolu berle, při případném poškození nebo opotřebení některého dílu je nutno ho vyměnit za nový originální díl nebo berli vyřadit z používání.
- K čištění berle lze použít běžné saponátové přípravky a pak berli otřít do sucha. Nesmí být použito organických rozpouštědel.

Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před slunečním zářením .

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: Handicap trade s.r.o., Bystrcká 15, 624 00 Brno
VÝROBEK: BERLE FRANCOUZSKÁ MĚKČENÁ VERA Handicap
TYP: VERA
ČÍSLO PN: 0222/HT/09



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení berle způsobené jejím obvyklým užíváním. Reklamace se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

DATUM PRODEJE:

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 01.11.2021

RAZÍTKO PRODEJNY

 **Handicap trade s.r.o.**
Bystrcká 15, 624 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
e-mail: info@berle.cz www.berle.cz



handicap
TRADE
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY