


NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU VÍCEÚČELOVÝ ZÁBAL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ NA KRK

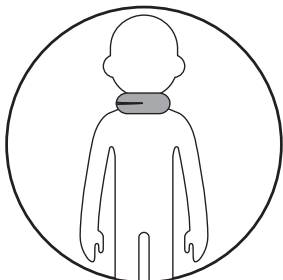

K ČEMU JE ZÁBAL URČEN?

- Ulevuje při běžném bolení a škrábaní v krku
- Pomáhá při nachlazení
- Pomáhá při bolestech krční páteře
- Ulevuje při angíně
- Pomáhá dětem při laryngitidě
- Tlumí zánět nosu, jícnu a nosních dutin

Před použitím výrobku čtěte pozorně tento příbalový leták.

Inspirovali jsme se **Priessnitzovým zábal**em - tradicí ověřený a osvědčený přírodní postup, který používaly již naše babičky od dob jeho objevení Vincenzem Priessnitzem (1799–1851), zakladatelem tzv. hydroterapie. Tato prověřená procedura vede ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím se zrychlují hojivé procesy v těle.

1. Vnitřní odnímatelný díl (obklad) zábalového pásu vyjměte a namočte do studené vody cca 8-16 °C (teplotu vody je důležité zvolit podle stavu pacienta - u dětí a oslabených, či vyhublých pacientů volíme méně studenou vodu)
2. Vyždímaný obklad vložte zpět do zábalového pásu.
3. Pásem obejměte postižené místo a upevněte suchým zipem.

Zábal by měl dobře přilnout. Při bolesti krční páteře a šíjového svalstva použijte zábal formou suchého teplého obkladu v kombinaci s našimi BIO pohankovými, či třešňovými polštářky. Polštářky je možné zakoupit u daných prodejců či na našem e-shopu www.mamavis.cz.

1. Vnitřní vyjímatelnou část zábalu ponechte v tomto případě stranou.
2. Nahřejte pohankový či třešňový polštářek na co nejvyšší teplotu, která bude pro Vaše tělo snesitelná. Nahřátí provedte v mikrovlnné troubě viz. příbalový leták pro zábalové polštářky Mamavis, nebo v klasické troubě, žehličkou či jen na topení.
3. Nahřáté polštářky podvěste pod pásky.
4. Takto připravený zábal oviňte v místě potíží, upevněte pomocí suchého zipu a dopřejte si teplý zábal tak dlouho, jak jen to bude příjemné. Zábal aplikujte vždy přímo na pokožku, přičemž dbejte těsného přilnutí.

Délka použití Priessnitzova zábalu: Zábal nechte působit 5–10 minut. Opakujte do odeznění potíží, případně se poradte se svým lékařem.

MAMAVIS doporučuje: Na bolest v krku jakéhokoliv druhu použijte osvědčený tvarohový, či citronový obklad, jehož přípravu naleznete na www.mamavis.cz v sekci Návody / Bolest v krku. **Tato aplikace je doporučena pouze zkušeným a znalým správného postupu.**

Výrobek je chráněn úřadem průmyslového vlastnictví.

Jeho výroba bez souhlasu majitele patentu je protizákonná.

Nenechte nic náhodě a o použití zábalového pásu Mamavis se případně poradte s Vaším lékařem.

Prosíme, dodržujte pokyny v příbalovém letáku.

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu www.mamavis.cz včetně instruktážních videí.

ZÁBALY DLE VINCENZE PRIESSNITZE

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OŠETŘENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS:

- Zábaly je možné prát v pračce při 40 °C a nechat volně uschnout (při sušení nenatahovat).
- Na materiálu nešetříme, proto by měl vydržet 3-5 let podle toho, jak často se bude zábal používat.

PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ MAMAVIS DBEJTE TĚCHTO ZÁSAD:

- Ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost.
- Při praní ponechte suché zipy na výrobku zapnuté, udržujte je nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci.
- Teplota praní nesmí překročit 40 °C.
- Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamacie.



Upozornění:

Přírodní zábal se nesmí přikládat na místa infikovaná záněty, špatně se hojící rány, nebo kožní nemoci (ekzém aj.).

Dodržování výše uvedených zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Naše výrobky mají atesty pro děti mladší 3 let.

Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

SLOŽENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS:

- Vnější vrstva: 100 % bavlna
- Jádro: 50 % polyester, 25 % bavlna, 25 % polyuretan
- Vnitřní vrstva: 100 % bavlna
- Upínání: suchý zip
- Součástí většiny zábalů je vnitřní vyjímatelný díl ze 100% bavlny.

Naše víceúčelové zábaly pomáhají při léčbě, rehabilitaci a relaxaci:

- Vrchní vrstva tvoří pás ze 100% bavlny a protialergického rouna.
- Střední vrstva je nepropustná část pásu umístěna mezi vrchní a spodní vrstvou. Zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.
- Spodní vrstva je tvořena odnímatelnou vložkou z tenkého savého materiálu.