

## Toaletní nástavec Molett

Č. artiklu 3011522 / 3011532

# Návod k montáži a použití

## ÚVOD

Tento návod k použití představuje pomůcku, která vám pomůže osvojit si způsob bezpečného zacházení s produktem, a slouží tak k prevenci úrazů.

### Pozor:

! Před prvním použitím si přečtěte tento návod k montáži a použití.

## POPIS

Plastový *toaletní nástavec Molett* umožňuje snadnou montáž na většinu běžných kramických WC a zvyšuje sedací plochu o cca 10 cm. Dodává se víkem nebo bez víka. Připevní se bočními fixačními šrouby. Spodní strana je pro snadné čištění uzavřená.

## POUŽITÍ

*Toaletní nástavec Molett* slouží jako pomůcka při sedání a vstávání v kombinaci s běžným WC.



## **KONTROLA PŘI PŘEVZETÍ**

Výrobek celý vybalte a zkontrolujte zásilku, zda je kompletní a nevykazuje poškození způsobené dopravou. Pokud byste zjistili, že výrobek nebo zásilka má nějakou vadu:

1. Neprodleně reklamujte u dopravce.
2. Nechejte škodu/vadu zaprotokolovat.
3. Neprodleně informujte nás nebo svého prodejce.

## **ROZSAH DODÁVKY**

*Toaletní nástavec Molett*

Model :3011522

(1) 1x toaletní nástavec [1]

Model :3011522

(2) 1x toaletní nástavec s víkem [2]

(-) 1x Návod k použití



## MONTÁŽ

Toaletní nástavec se dodává v předmontovaném stavu. Je třeba nasadit pouze upevňovací svorky.

☞ Montáž *toaletního nástavce MOLETT* by měl provádět vhodný odborník nebo prodejce pomůcky.

1. Spojte upevňovací šroub a držák [3]+[4].
2. Upevňovací šroub a držák nastrčte do úchyty [5].
3. Upevňovací šrouby zašroubujte o několik otáček [6].
4. Zvedněte standardní sedátko s víkem a nasadte nástavec doprostřed toalety.
5. Toaletní nástavec zafixujte ručním utahčením bočních upevňovacích šroubů.

### Pozor:

! Na závěr zkontrolujte, zda všechny upevňovací šrouby jsou pevné.

☞ Případně šrouby dotáhněte.

Toaletní nástavec je nyní připravený k použití.



# NÁVOD K POUŽITÍ

## Bezpečnostní pokyny

- ☞ Nestoupejte/nesedejte si na víko.
- ☞ Opírejte se rovnoměrně oběma rukama o okraj sedátka.
- ☞ Zajistěte, aby upevňovací šrouby byly rovnoměrně dotažené rukou.
- ☞ Zkontrolujte pevné upevnění šroubů k toaletní keramice.
  - ☞ Mějte na paměti, že *toaletní nástavec* není k toaletní míse pevně přišroubovaný, ale jenom připevněný svorkami.
- ☞ Poškozené díly okamžitě nechejte u svého prodejce vyměnit.
- ☞ Před každým použitím se ujistěte, že protiskuzové prvky na upevňovacích svorkách jsou v bezvadném stavu!
- ☞ Před každým použitím zajistěte, aby víko nemohlo nechtěně upadnout.
  - ☞ Nebezpečí poranění!
- ☞ Při dlouhém vystavení přímému slunečnímu nebo světelnému záření se povrch může silně zahřát. – Nebezpečí úrazu při kontaktu s nezakrytými částmi těla! Zamezte takovému zahřívání tím, že zdroje světla nastavíte jiným směrem a zneможníte, aby na nástavec svítilo slunce.

# ÚDRŽBA

## Pokyny pro údržbu

Přestože konstrukce je stabilní, konstrukční díly jako upevnění, sedátko/víko podléhají určitému opotřebení. Proto se doporučuje nechat *toaletní nástavec* každých 6 měsíců zkontrolovat odborníkem. Pozornost je třeba věnovat zejména pevnému usazení protiskuzových prvků (upevňovací svorky)!

## Čištění

K čištění a péči používejte mýdlový roztok nebo výrobky na bázi vody neobsahující silikon.

- ☞ Řiďte se zde pokyny k použití od výrobce.
- ☞ Čisticí prostředek by v každém případě měl mít hodnotu pH min. 6 (neutrální čistič).
- ☞ Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, např. ředidla, ani tvrdé kartáče atd.
- ☞ *Toaletní nástavec* není vhodný k čištění v automatických myčkách!

Omyjte čistou vodou a osušte.

## Dezinfekce

Jestliže výrobek používá více osob (např. v pečovatelském ústavu), je předepsaná aplikace běžných dezinfekčních prostředků.

- ☞ Před dezinfekcí produkt vyčistěte.
- ☞ Dezinfekce postřikem nebo otěrem je povolena s odzkoušenými a schválenými dezinfekčními prostředky.
- ☞ Řiďte se zde pokyny k použití od výrobce.

Seznam dezinfekčních prostředků a metod odzkoušených a uznaných Institutem Roberta Kocha naleznete na adrese:

< <http://www.rki.de> >.

- ☞ Při používání dezinfekčních prostředků se může stát, že podle okolností povrchy jejich působením trpí, což může omezit dlouhodobou funkčnost konstrukčních dílů.

## Recirkulace

Před každou recirkulací se toaletní nástavec musí podrobit kompletní inspekční prohlídce.

- ☞ **Upozornění:**  
Hygienická opatření nutná pro opětovné použití (recirkulaci) je nutné provádět podle platného hygienického plánu.

## Opravy

Používejte výlučně originální náhradní díly. Využívejte servisní služby vašeho školeného prodejce.

## Likvidace

Informace o místních firmách zabývajících se likvidací odpadů získáte na městském či obecním úřadě.

- Obal je recyklovatelný.
- Všechny kovové díly lze vrátit do sběru.
- Plastové díly jsou recyklovatelné.
- Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:.....*Toaletní nástavec Molett, 3011522 / 3011532*  
Materiál:..... plast  
Barva:..... bílá  
Výška celkem: ..... 160 mm  
Zvýšení sedačky:..... 100 mm  
Šířka bez šroubů:..... 380 mm  
Hloubka: ..... 430 mm  
Rozměry otvoru:..... 215 x 270 mm  
Svěrací šířka: ..... 325 - 405 mm  
Zatížitelnost ve svislém směru:..... max. 150 kg  
Hmotnost ..... cca. 1,0 / 3,0 kg

## TYPOVÝ ŠTÍTEK

Typový štítek se nachází na spodní straně toaletního nástavce.

## SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Č. artiklu	Kusů	Označení výrobku
291152000	1	Protiskluzová guma pro svěrací čelisti
291152001	1	Svěrací čelist bez protiskluzové gumy a upevňovacího šroubu
291152002	1	Upevňovací šroub

## RUČENÍ / ZÁRUKA

Za tento produkt přebíráme v rámci našich všeobecných obchodních podmínek zákonnou záruku. Při uplatňování záručních nároků se s potřebnými údaji o označení modelu, čísle dodacího listu s datem dodávky a sériovým číslem (SN) obraťte na Vašeho odborného prodejce.

Předpokladem pro uznání nároků z ručení resp. záruky je v každém případě používání výrobku podle účelu určení, používání originálních náhradních dílů u prodejců a pravidelné provádění údržby a prohlídek.

U poškození povrchu, poškození v důsledku uvolněných nýtových spojů a vytlučených upevňovacích otvorů a nadměrného namáhání je záruka vyloučena.

## Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.

Sídlo: Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4  
tel. 272 761 102, mail: meyra@meyra.cz

Pobočky: Ostrava, Janské Lázně, České Budějovice, Brno, Liberec, Plzeň

[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí ES 93 / 42 / EHS pro zdravotnické prostředky.

MEYRA 205 321 609 (Stav: 2013-11) Technické změny vyhrazeny.

### Pozor:

! Nerespektování návodu k použití, neodborně prováděná údržba a zejména technické změny a doplňky (nástavby) bez našeho souhlasu vedou k zániku jak záručních nároků, tak k ručení za výrobek všeobecně.

### Upozornění:

Tento návod k použití je součástí výrobku a při změně uživatele či majitele se proto musí k výrobku přiložit.

Technické změny ve smyslu pokroku si vyhrazujeme.

---

## Výrobce: MEYRA GmbH



Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal-Kalldorf



Tel +49 5733 922 - 311  
Fax +49 5733 922 - 9311



[info@meyra.de](mailto:info@meyra.de)

[www.meyra.de](http://www.meyra.de)

---