

Návod k použití

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

prečtete si prosím pečlivě návod k použití a obraťte se při případných dotazech na specializovaný obchod, popř. na náš technický servis. Abychom Vám ulehčili nasazení, přečtete si prosím pozorně tento návod.

Bandáže s gelovými polštářky jsou vynikajícím pomocníkem při různých terapeutických postupech. Kromě tradičního použití při podpůrné fixaci mohou být skvělým nástrojem pro terapii teplem a chladem. Po vychlazení v lednici mohou pomoci redukovat otoky a zklidnit bolest při nachlazení, zranění nebo svalovém napětí. Naopak po ohřátí v mikrovlnné troubě mohou podporovat prokrvení a uvolňovat svaly. Jejich všestrannost a schopnost přizpůsobit se potřebám těla je činí skvělým prostředkem pro péči o zdraví a pohodu.

Použití:

- Chladivý efekt: Účinný při různých typech bolesti, otoků nebo zánětů.
- Hřejivý efekt: Poskytuje úlevu při svalových bolestech, křečích a působí relaxačně.
- Funkce komprese: Důkladně obepíná dané místo a zároveň je pružná. Zapínání na suchý zip umožňuje nastavit si požadovanou míru komprese a podpory.
- Univerzálnost: Lze použít na zápěstí, kotník či chodidlo, pravou i levou stranu.

Zapnutí pásky:

Vložte ruku do bandáže, omotejte kolem zápěstí a zapněte suchý zip. V případě použití na kotník, obepněte páskou kotník a zapněte. Na požadovaném místě ponechte bandáž tak dlouho, jak to bude příjemné.

Gelový polštářek lze z bandáže vyjmout, ochladit nebo ohřát a pak pomocí suchého zipu připnout k pásce. Pro ohřívání lze využít lázeň v teplé vodě, nebo mikrovlnou troubu (max. 10 sekund). Pro ochlazení gelového polštářku ho vložte do lednice či mrazáku.

Údržba:

Suché zipy se před praním musejí sepnout. Perte v pracím přípravku na vlnu, případně v jemném pracím prášku při 30 °C, v šetrném pracím režimu nebo ručně. Důkladně vypláchněte a pověste ve vlhkém stavu. Nesušte na topném tělese nebo na přímém slunci. Skvrny nečistěte benzinem ani jinými chemickými čisticími prostředky. Zbytky mýdla mohou vyvolat podráždění pokožky a zvýšit opotřebení materiálu.

Pokyny ke skladování:

Skladujte při pokojové teplotě a v suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením.

