

# Vodotěsný návlek do sprchy Cryopush

## Návod k použití

Návlek vyjměte z krabičky a rozprostřete po celé jeho délce. Zkontrolujte, zda není někde poškozen.

Poté návlek opatrně navlékněte na určenou část těla (noha, ruka). Před sprchováním se ujistěte, zda neoprenový kroužek sedí přesně a nehrozí vniknutí vody dovnitř návleku. Kroužek by neměl škrtit, aby nedošlo k omezení krevního oběhu.

Návlek používejte jen po dobu nezbytně nutnou během sprchování.

Není určeno na použití při plavání !!!!!

Po použití nechte návlek volně uschnout. Nedávejte na topení a nevystavujte přímému slunci.