

# Návlek na opěrku francouzské berle



## 1. Použití výrobku

Návlek slouží jako vyměkčení opěrky francouzské berle. Zabraňuje možným otlakům při dlouhodobém používání této pomůcky. Návlek je určen pro berle francouzské předloketní duralové FD 93, FD 93 dlouhá a VERA.



## 2. Popis výrobku

Návlek je zhotoven z pryže, která má z jedné strany samolepící vrstvu pro snadné uchycení na opěrce berle.

## 3. Nasazení výrobku

Při nasazování návleku na opěrku postupujte následujícím způsobem:

- Z návleku se sundá papírová vrstva, která chrání samolepící plochu.
- Návlek se nalepí od středu vnitřní části opěrky ① tak, aby horní rovná strana byla zároveň s vnitřní horní hranou předloketní opěrky berle.
- Při lepení postupujte z jedné strany na druhou ② tak, aby horní rovná část měkčení kopírovala horní hranu opěrky. ③

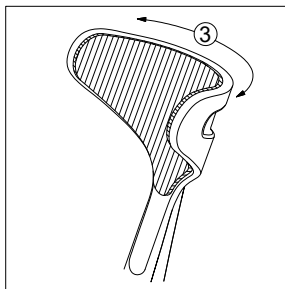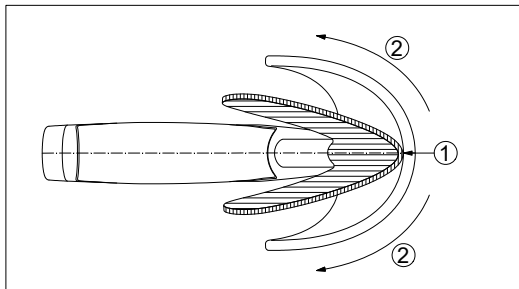

## 4. Hmotnost

Hmotnost návleku na opěrku berle je cca 7 g ± 3%.

## 5. Údržba

Návlek lze otírat vodou a čistit běžnými prostředky. Po odstranění návleku je potřeba z opěrky očistit případné zbytky lepicí vrstvy. **Nesmí být použito organických rozpouštědel.**

## 6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA  
tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz




# ZÁRUČNÍ LIST

**VÝROBCE:** ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

**VÝROBEK:** NÁVLEK NA OPĚRKU FRANCOUZSKÉ BERLE

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení návleku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb. Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

**ZNAČKA KONTROLY:**

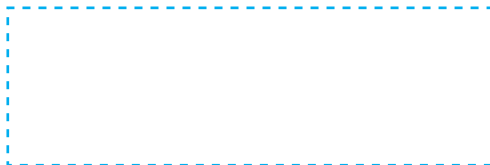

**DATUM PRODEJE:** .....

**DATUM POSLEDNÍ REVIZE:** 01.03.2020

**RAZÍTKO PRODEJNY**



**ERILENS s.r.o.**

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA

tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz

