

# protect.Ankle foot orthosis

---

## Ortéza Hlezna

---

### Indikace

- Pooperační doléčení po rekonstrukci šlach
- Konzervativní léčba poškození fibulárního vazů
- Chronické nestability hlezna

### Kontraindikace

V současné době nejsou žádné známy.

### Pokyny k nošení

Anatomicky tvarovaná a tuhá skořepina poskytuje stabilitu a omezuje možnost rotace. Ortéza způsobuje mírnou pronaci a dorzální flexi nohy. Noste ortézu přes ponožku a s obuví.

### Úprava dlahy

- Vyberte správnou velikost.
- Zatlačte patu proti patové části.
- Zapněte popruh.
- Je-li to zapotřebí, patový díl náležitě ustříhňte.

---

### Návod na údržbu

Před čištěním zavřete suchý zip. Ortézu vyperte ručně ve vlažné mýdlové vodě nebo ji otřete vlhkým hadříkem.

Nechte uschnout na vzduchu.



---

### Pokyny pro skladování

Ortézu skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními paprsky.

### Složení materiálu

Polypropylén

### Záruka/ručení

jsou v rámci zákonných ustanovení.