

# protect. Dorsofix

## Informace o účelu použití

protect.Dorsofix je podpůrný korzet. Výrobek je určen výhradně k použití po odborném nasazení na zadní a pouze na nepoškozenou kůži.

## Oblasti použití

- Akutní a chronická lumbalgie a dorsolumbalgie
- Lumbální radikulopatie
- Výhřezy meziobratlových plotének
- Kulatá záda
- Lehké spondylolistézy
- Osteoporóza s infrakcemi obratlů
- Léčba po zásazích ke stabilizaci páteře

## Kontraindikace

V současné době nejsou žádné známy.

## Návod na používání

- Přiložte korzet pomocí obou poutek a fixujte přední uzávěr (Obr. 1).
- Sejměte ochranný proužek ze suchého zipu spodních elastických stahovacích pásků a upevněte je na přední část suchého zipu (Obr. 2).
- Sejměte ochranný proužek ze suchého zipu horních elastických stahovacích pásků a upevněte je na přední část suchého zipu (Obr. 3).
- Přiložte ramenní pásy tak, že je vedete přes ramena a pod pažemi na záda, na zádech křížem svislým poutkem a nakonec je vpředu připevníte na přední uzávěr korzetu (Obr. 4).
- Alternativně můžete použít vodorovný pás a upravit přítlačný tlak na zádech. Ramenní pásy pak vedte přes ramena a pod pažemi. Pásy přitáhněte sponami vodorovného pásu, suchý zip na konci pásů pak otočte a připevněte je na přední část zipu (Obr. 5/6). Přeložením

kapsy lze její délku individuálně nastavit. K zařizování kapsy je třeba jen přesunout body suchého zipu. Jako doplněk lze doobjednat poutko na palec. Dbejte prosím na to, aby úplně první nasazení ramenního pásu proběhlo pod dohledem a za instruktáže vyškoleného odborného personálu.

## Pokyny k praní

Pásy na suchý zip před praním zapněte. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebením materiálu.

- Výrobek perte v ruce a nejlépe za použití pracího prostředku medi clean.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit



## Pokyny pro skladování

Výrobku skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními paprsky.

## Materiálové složení

Bavlna, lycra

## Záruka

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

## Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.