

protect. PT soft

Informace o účelu použití

protect.PT je kolenní ortéza pro korekci čéšky. Výrobek je určen výhradně k ortotické terapii kolena, pokožka v oblasti přiložení ortézy nesmí být poškozena nebo poraněná.

Indikace

- Femoropatelní syndrom bolesti
- Chondropathia patellae
- Retropatelní artróza
- Pooperativní a posttraumatické stavy podráždění
- Patelní a kolenní nestability

Kontraindikace

V současné době nejsou žádné známy.

Návod k nasazení

- Rozepněte oba pásy.
- Ohněte nohu do úhlu cca. 45°. Přetáhněte ortézu přes nohu (obr. 1).
- Dbejte na to, aby se kolenní čéška nacházela uprostřed čéškové mezery (obr. 2).
- Nyní zapněte oba pásy, začněte horním (obr. 3) a pokračujte spodním pásem (obr. 4).
- Pokud je to možné, ujděte několik kroků a znovu zkontrolujte správnou pozici ortézy (obr. 5). V případě potřeby upravte pozici ortézy na noze.
- Pro sejmutí uchopte ortézu po stranách za spodní okraj a stáhněte ji směrem dolů (obr. 6).

Pokyny k praní

Před praním uzavřete pásky na suchý zip a odstraňte dlahy kloubu. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebením materiálu.

- Výrobek perete v ruce a nejlépe za použití pracího prostředku medi clean.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit.



Pokyny pro skladování

Ortézu skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními paprsky.

Materiál

Polyamid, Elastan, PU, polyester

Záruka

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.