

SanoPod rehabilitační podložky

Návod k použití

Před použitím našich výrobků čtěte pozorně tento návod. U zdravotnických prostředků doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.

Při používání našich výrobků dbejte těchto zásad:

- ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost
- na výrobcích neprovádějte vlastní úpravy
- výrobky jsou nesterilní a nesmí být použity přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku, v případě přecitlivělosti a alergie není vhodné je používat přímo na tělo
- při použití masti nebo gelu nepoužívejte výrobek přímo na těle
- při ošetření výrobků postupujte podle pracích symbol
- zipy na výrobcích je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci
- výrobky je třeba chránit před stykem s ostrými předměty
- výrobky nevystavujte příliš vysokým teplotám a nesušte na topném tělese
- výrobky nesmí přijít do styku s chemikáliemi

Dodržování zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Použité obal a později vlastní použitý výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Pokyny k údržbě:

Před praním sundejte povlak. Zipy se před praním musejí sepnout. Perte v pracím přípravku na vlnu, případně v jemném pracím prášku při 30°C, v šetrném pracím režimu, nebo ručně. Důkladně opláchněte a pověste ve vlhkém stavu. Nesušte na topném tělese nebo na přímém slunci. Skvrny nečistěte benzinem ani jinými chemickými čisticími prostředky. Zbytky mýdla mohou vyvolat podráždění pokožky a zvýšit opotřebení materiálu.

Pokyny ke skladování:

Skladujte při pokojové teplotě a v suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Výrobce: SANOMED CZ

Made in Czechia for SANOMED



© SANOMED, spol. s r.o. | 612 00 Brno | Palackého tř. 75 | IČO: 479 101 27 | tel.: 541 422 911

Datum vydání poslední revize návodu k použití: 20.07.2021