

Ortéra prstová dynamická – typ 313

Návod k použití zdravotnických prostředků SANOMED, spol. s r.o.

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

přečtěte si prosím pečlivě návod k použití a obraťte se při případných dotazech na svého ošetřujícího lékaře nebo na specializovaný obchod, popř. na náš technický servis. Abychom Vám ulehčili nasazení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. U zdravotnických prostředků doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.

Důležité pokyny:

- Zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis, který musí být nošen dle návodu k použití
- výrobek je určen pro jednorázové použití pacientem.
- při neodborném použití je vyloučena záruka na výrobek.
- na výrobku neprovádějte žádné vlastní úpravy. Při nerespektování může být funkce výrobku omezena.
- pokud zjistíte na sobě neobvyklé změny (např. zhoršení potíží), ihned prosím vyhledejte svého lékaře.
- zabraňte styku výrobku s prostředky obsahujícími tuk a kyseliny, mastí a tělovým mlékem.
- likvidace výrobku smí být provedena bez problémů prostřednictvím domovního odpadu.
- pokud jsou suché zipy na výrobku, je třeba je prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztratí svoji funkci

Popis výrobku:

Ortéra je zhotovena z pružinového drátu s plastovými pelotami. Ortéra se vyrábí ve třech velikostech lišících se obvodem prstu.

Rozměry:

Velikost	Délka prstu (cm)
S	4,5-5
M	5-6
L	5-7

Indikace: pooperační a poúrazové stavy prstů horní končetiny, kde je nezbytná postupná rehabilitace, pro obnovu flexorů prstů ruky a zajištění dynamické extenze v PIP a MCP kloubu


Použití:

Prst se vsune mezi tři peloty tak, aby pomůcka zabezpečovala dynamický pohyb prstu. Při flexi prstu ruky vytváří ortéza požadovaný dynamický extenční moment na PIP a MCP kloub. Tlak jednotlivých pelot musí být úměrný, aby nedocházelo ke vzniku otlaků nebo zarudnutí pokožky.

Mytí a péče: utírejte pouze vlhkým hadříkem

Pokyny ke skladování:

Skladovat při pokojové teplotě a v suchu. Chránit před přímým slunečním zářením.

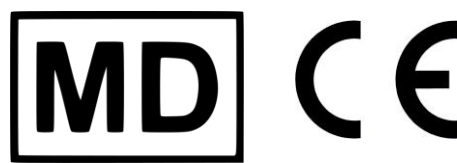

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení dlahy způsobené jejím obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb.