



## Drytex Wrap Economy Hinged Knee



### ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TÉTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

#### ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Podpora pro mírné nestability vnitřních a/nebo vnějších kolaterálních vazů
- Mírná artritida
- Stav po artroskopické menisektomii
- Pocit mírné nestability kloubu

#### KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

#### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

**JEDINCI, KTEŘÍ JSOU NÁCHYLNI K DERMATITIDĚ NEBO ALERGICKÉ REAKCI NA NEOPREN A JEHO VEDLEJŠÍ PRODUKTY BY NEMĚLI NOSIT ORTÉZY VYROBENÉ Z NEOPRENU.**

#### POKYNY K NAsAZENÍ:

##### Návleková ortéza

##### Zavinovací ortéza

- A. Odepněte a uvolněte všechny pásky.
- B. Pokud používáte návlekovou ortézu, uchopte ortézu na okraje a navlékněte ji na dolní končetinu. Pokud používáte zavinovací ortézu, jednoduše obtočte ortézu kolem kolena a zajistěte ji v přední části dolní končetiny. Umístěte ortézu na koleno tak, aby klouby ortézy byly na stejné úrovni po obou stranách kolena a horní část kruhového vykrojení byla zarovnána s horním okrajem česky.
- C. Upevněte pásky na stehně a na lýtku.

#### D. SUNDAVÁNÍ ORTÉZY

- Ortézu sundáte rozepnutím všech pásek nebo shrnutím horního okraje ortézy směrem dolů.

#### ÚDRŽBA:

- Ortézu perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. **SUŠTE VOLNĚ NA VZDUCHU.** Klouby ortézy je možné před praním vyjmout.

**Poznámka:** Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbylé mýdlo může způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

- Ortézu je možné používat ve sladké i slané vodě. Po použití ve vodě ortézu pořádně propláchněte čistou vodou a poté ji nechte dobře vysušit na vzduchu.

#### SLOŽENÍ:



NEOBSAHUJE LATEX

#### URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC provede opravu nebo výměnu částí nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

**OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITY NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.**

