



TROM™ Advance Telescoping Cool

DLAHA KOLENNÍ REHABILITAČNÍ TELESKOPICKÁ

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TÉTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Určeno pro znehybnění a omezení rozsahu pohybu v souvislosti s operací LCA, LCP, LCL a LCM a reparací menisků.
- Tato pomůcka byla navržena k doplnění různých dalších léčebných metod běžně využívaných pro výše uvedené onemocnění. Nastavení rozsahu pohybu, frekvence a doba používání by měly být stanoveny Vaším lékařem.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NAsAZENÍ:

1. Uvolněte sponu u všech pásků a odstraňte molitanové části. Položte končetinu do ortézy, pevně zabalte bérce a stehno a připevněte vpředu. Molitan je možné zkrátit tak, aby na končetině dobře seděl.
 2. Upravte délku tyče na stehně a na bérce stisknutím šedého knoflíku a posunutím lopatek pásku do požadované délky. Ujistěte se, že jsou obě tyče stejně dlouhé a že každá lopatka pásku je ve stejné poloze jako na druhé tyči. Při pooperační terapii mohou být tyče prodlouženy na plnou délku končetiny až ke kotníku.
 3. Napoložte tyče ortézy tak, aby byly oba klouby ortézy v rovině s česčkou a zároveň se středovou linií končetiny na mediální i laterální straně nohy. Zevní kotník a velký trochanter kyčle mohou posloužit jako referenční body pro zarovnání do středu končetiny. Ujistěte se, že klouby ortézy jsou na obou stranách ve stejné výšce.
 4. Pro úpravu pozice pásků na končetině zmáčkněte šedý knoflík a posuňte lopatky pásku Tele-fit do požadované pozice na končetině.
 5. Utáhněte dva pásky nejbliže ke kolenu a pak pokračujte se zbývajících dvěma pásky. Uvolněte spony vytažením z rámu a pevně dotáhněte pásky, aby se odstranila mezera za končetinou, a přitom udržujte nastavenou pozici tyčí a klouby ortézy. V případě potřeby je možné pásek zkrátit a konec pásku je možné přemístit na nový okraj.
 6. Pro nastavení flexe a extenze posuňte knoflíky na klouby ortézy do požadovaného nastavení flexe/extenze dle pokynů Vašeho lékaře. V případě, že budete chtít nastavit ortézu do polohy extenze, může být potřeba nejdříve nastavit tyče a celou ortézu do polohy extenze, jinak nemusí být možné knoflíkem pro nastavení extenze pohnout.
 7. Pro uzamčení klouby ortézy posuňte knoflík se šipkou na vnějším okraji klouby do požadovaného nastavení, ve kterém chcete ortézu fixovat. Posuňte knoflík do zamčené pozice tak, že namíříte šipku směrem do středu klouby.
 8. Pro snadné sejmutí ortézy jako celku uvolněte sponky a otevřete molitanové části. Ortézu je pak možné sejmut a znovu nasadit jako jeden celek.
- A. Tyče ortézy je možné upravit tak, aby vyhovovaly varóznímu nebo valgóznímu postavení kolene. Ohněte tyče tak, že je přitlačíte proti pevnému podkladu a zlehka a kontinuálním tlakem ohýbáte v požadovaný směr. Ohněte všechny tyče ve stejném rozsahu nad a pod kloubem ortézy.
- B. Aby bylo nasazení ortézy po operaci co nejsnazší, nastavte si ortézu již před operací, jel-li to možné.

ÚDRŽBA:

- Molitanovou podšívku perte ručně ve studené vodě s použitím jemného mýdla. Sušte volně na vzduchu, nepoužívejte sušičku. Je doporučeno pravidelné čištění ortézy. Veškeré molitanové součásti je možné zkrátit. Před jakoukoli úpravou ortézy se vždy poraďte se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.

SLOŽENÍ:



NEOBSAHUJE PŘÍRODNÍ PRYŽOVÝ LATEX

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SÍLY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

