


Držák na berle a hole

PN 0205/E/03

1. Použití výrobku

Držák slouží jako pomůcka k odkládání předloketní berle nebo hole. Zabraňuje jejímu spadnutí, omezuje poškození berle nebo hole pádem. Je vhodný zejména tam kde se odkládá často a na delší dobu (lůžko, pracovní stůl apod.). Držák je určen pro berle a hole jejichž nosník má $\text{Ø}18 - 25$ mm. Držák je možno použít i pro nosníky menších rozměrů (od $\text{Ø} 15$ mm), berle nebo hůl však musí být spodním koncem (násadcem) opřena o podložku (např. podlaha). Držák se připevňuje na podložku šrouby nebo vruty.

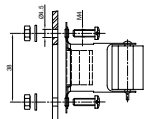

2. Popis výrobku

Těleso držáku ve tvaru uzavřeného U je zhotoveno z pružného ocelového plechu. Zadní strana je opatřena dvěma otvory pro připevnění držáku šrouby nebo vruty. Na předních koncích držáku jsou připevněny dva pryžové válečky otočné kolem své osy.

3. Hmotnost

Hmotnost násadce: $35 \text{ g} \pm 10\%$



4. Montáž držáku berle

Držák se připevňuje na dostatečně pevnou podložku (stěna, nábytek a pod). Druh šroubu nebo vrutu se volí dle materiálu podložky a lze použít:

- šrouby M3 s válcovou nebo půlkulatou hlavou, s maticí a podložkou (délka šroubu 10 mm + tloušťka materiálu, na který je držák upevňován)
- šrouby do plechu 3 x 16 mm
- vruty $\text{Ø} 3$ mm minimální délky 20 mm

5. Používání držáku

- Při vkládání **1.** berle do držáku se nosník berle vloží mezi dva otočné válečky a tlakem ve směru šipky se vtlačí do držáku.
- Při vyjímání **2.** berle z držáku se na nosník berle působí tahem ve směru šipky. Pro usnadnění vyjímání lze berli mírně naklonit.

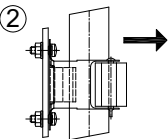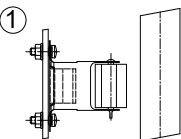

6. Čištění a údržba

Kromě čištění nevyžaduje držák žádnou zvláštní údržbu. K čištění lze použít běžné saponátové čisticí prostředky a držák otřít do sucha.

Nepoužívat organická rozpouštědla.

7. Ekologické informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: ERILENS s.r.o.
Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

VÝROBEK: Držák na berle a hole


ČÍSLO PN: 0205/E/03

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb. Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



DATUM PRODEJE:

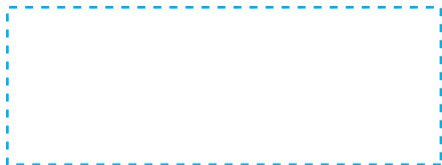

RAZÍTKO PRODEJNY

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 01.01.2020

 ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, CZ

tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz

 ERILENS®

www.erilens.cz