

# Gelová bandáž Kinetec Kooler chladivá/hřejivá

**cold/  
warm**

adjustable  
gel pack



- úleva od bolesti svalů či kloubů
- snížení otoku při lehkých zraněních
- použití při kontuzích, distenzích, distorzích
- prohřátí dutin či šíje při nachlazení

**kinetec** kooler™

## Univerzální použití – chladivá či hřejivá bandáž



### Snadná aplikace díky fixačním páskům

#### Chlazení

- pro časté, okamžité použití skladujte bandáž v chladu
- pro silnější účinek umístěte na 1 hodinu do lednice či mrazáku
- pro zvýšení účinku chladivého obkladu použijte v klidové poloze (vleže), chlazenou část těla držte nahore

#### Prohřívání

- při ohřívání v mikrovlnné troubě dbejte maximální opatrnosti, mikrovlnné trouby mají různý výkon
- při maximálním výkonu mikrovlnné trouby ohřívejte 30 sekund, poté nechte bandáž 1 min na vzduchu a teprve potom aplikujte na ošetřovanou část těla, při potřebě vyšší teploty nepřekročte dobu 10 sec pro opakované zahřívání

Výrobce: Kinetec SAS, Zone Industrielle de Tournes, Rue Maurice Perin, F-08090 Tournes, Francie