

Kintex – Zápěstní páska - 6108

Lehká bandáž zápěstí, která se dokonale přizpůsobuje anatomii ruky, poskytuje podporu zápěstí, pomáhá udržovat tělesné teplo a podporuje proces hojení. Neopren poskytuje příjemné teplo, které urychluje proces hojení a zmírňuje bolest.

Použití: bolesti zápěstí, zánět šlach, artritida, nestability zápěstí

Nasazení pásky:

Omotejte bandáž kolem zápěstí a upevněte pomocí suchého zipu.

Doporučení:

Před použitím výrobku se vždy poradte s lékařem! Výrobek se nesmí používat za žádných okolností:

- na otevřené rány
- při poruchách krevního oběhu
- při kožních onemocněních
- nebo při alergických reakcích na některý z materiálů

Pokud se při nošení výrobku objeví podráždění kůže nebo jiné nežádoucí účinky, okamžitě přestaňte výrobek používat a poradte se s lékařem.

Materiál: 65% neopren, 35% nylon

Pokyny pro praní:

Před praním zapněte suché zipy. Bandáž perte v pračce na max. 30°C na šetrný cyklus. Bandáž sušte rozloženou. Bandáž se nesmí sušit v sušičce!

Výrobce:

Apaloo UG

Sunthausenstr. 5, 78609 Tuningen

Tel: +49 7464 980282, Fax: +49 7420 521619

E-Mail: info@kintex.de

Web: www.kintex.de