


NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU ZNAČKY MAMAVIS® VÍCEÚČELOVÝ ZÁBAL NA KARPÁLY A ZÁPĚSTÍ

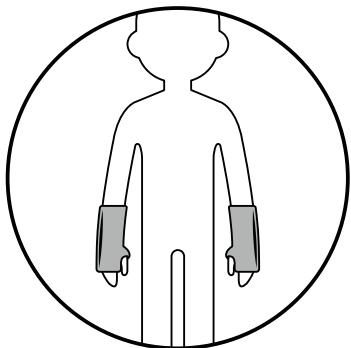

K ČEMU JE ZÁBAL URČEN?

- Pomáhá od zánětu šlach zápěstí
- Tlumí syndrom karpálního tunelu
- Urychluje hojení poúrazových a pooperačních stavů
- Účinný při revmatických potížích

Před použitím výrobku čtěte pozorně tento příbalový leták.

Inspirovali jsme se **Priessnitzovým zábalem** – tradicí ověřený a osvědčený přírodní postup, který používaly již naše babičky od dob objevení Vincenzem Priessnitzem (1799-1851), zakladatelem tzv. hydroterapie. Tato prověřená procedura vede ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím se zrychlují hojivé procesy v těle.

Pokud trpíte syndromem karpálního tunelu, zánětem šlach zápěstí, nebo revmatickými potížemi, použijte zábal jako Priessnitzův obklad.

1. Vyjměte vnitřní díl zábalového pásu a namočte jej do studené vody (teplotu vody je důležité zvolit podle stavu pacienta – pokud je člověk velmi oslabený, nebo vyhublý, zvolte méně studenou vodu)
2. Namočený díl navlékněte na ruku.
3. Následně zábal navlékněte na palec a obejměte jím zápěstí tak, aby využitá část byla na vnitřní straně zápěstí.

Nenechte nic náhodě a o použití zábalového pásu Mamavis® se případně poraděte s Vaším lékařem.
Prosíme, dodržujte pokyny v příbalovém letáku.

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu www.mamavis.cz včetně instruktážních videí.

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu www.mamavis.cz včetně instruktážních videí.

Ti, kteří znají léčebný účinek přírodních léčiv jako jsou bylinky apod., mohou namáčet vyjímatelný obklad v bylinné lázni, případně potřít bylinnými mastmi, tvarořem apod.

Tato aplikace je doporučena pouze zkušeným a znalým správného postupu.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OŠETŘENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:

- Zábal je možné prát normálně v pračce při 40 °C a nechat volně uschnout (při sušení nenatahovat).
- Na materiálu nešetříme, proto by měl vydržet 3-5 let podle toho, jak často se bude zábal používat.

PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ MAMAVIS® DBEJTE TĚCHTO ZÁSAD:

- Ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost.
- Při praní ponechejte suché zipy na výrobku zapnuté, udržujte je nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci.
- Teplota praní nesmí překročit 40 °C.
- Výrobek chráňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace.



Upozornění:

Přirodní zábal se nesmí přikládat na místa infikovaná záněty, špatně se hojící rány, nebo kožní nemoci (ekzém aj.).

Dodržování výše uvedených zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Naše výrobky mají atesty pro děti mladší 3 let. Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

SLOŽENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:

- Vnější vrstva: 100 % bavlna
- Jádro: 50 % polyester, 25 % viskoza, 25 % polyuretan
- Vnitřní vrstva: 100 % bavlna
- Upínání: suchý zip
- Součástí většiny zábalů je vnitřní vyjmíatelný díl ze 100% bavlny nebo nanotextilie.

Naše víceúčelové zábaly pomáhají při jsou určeny zejména k léčebným, rehabilitačním a relaxačním účelům. Vyznačují se tím, že se skládají ze čtyř vrstev:

- Vrchní vrstva tvoří pás ze 100% bavlny a protialergického rouna.
- Střední vrstva je nepropustná a zpevňující část pásu umístěna mezi vrchní a spodní vrstvou. Zajistí neprůchodusnost vody materiélem, zároveň udrží teplo a zábal zpevní.
- Spodní vrstva je tvořena odnímatelnou vložkou z tenkého savého materiálu.