

SERVER HD

Odlehčené chodítko pro vyšší zatížení
Návod k použití (CZ)



REHASENSE



1 Základní informace

Vážený zákazníku,

tento návod k použití obsahuje popis zdravotnického prostředku a důležité pokyny pro zajištění správného a bezpečného používání výrobku. Před použitím je důležité si pečlivě pročíst tento návod. Obzvláště důležité je přečíst si bezpečnostní pokyny a dodržovat je.

REHASENSE neustále vyvíjí své výrobky a vyhrazuje si právo bez upozornění měnit specifikace a funkce výrobků.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím svého prodejce nebo přímo společnost **Rehasense**. Kontaktní informace jsou uvedeny na poslední straně tohoto návodu.

2 Zamýšlené použití, indikace & kontraindikace

Zamýšlené použití: Chodítka bylo navrženo jako zařízení na pomoc při chůzi pro lidi, kteří mají problémy s pohyblivostí, například se stáním, s chůzí nebo samostatným sezením. Díky chodítku mohou tyto lidé snadno stát, chodit a odpočívat a mohou plnit většinu svých každodenních úkolů a rutin bez pomoci ostatních. Jakékoliv jiné použití je zakázáno.

Indikace: Zařízení je speciálně navrženo pro jedince, kteří kvůli široké škále možných zdravotních problémů vyžadují dodatečnou stabilní oporu při chůzi.

Kontraindikace: Zařízení nesmějí používat uživatelé, kteří mají vážné problémy s rovnováhou těla nebo jejichž svalová síla je příliš nízká na to, aby byli schopni stát a chodit a to ani s podporou chodítka. Potřebu a možnost použití chodítka uživatelem by měl vždy posoudit a indikovat lékař nebo fyzioterapeut.

3 Dodávka a obecný popis výrobku

Chodítka jsou dodávána v krabicích ve složeném stavu pro jednodušší transport.

Obsah dodávky je:

- 1 kompletní, složené chodítka, včetně sedáku a tašky
- 1 set držáku hole
- 1 návod k použití

Server HD je čtyřkolové, odlehčené chodítka s křížovým skládacím rámem. Výrobek je vyroben z hliníku, takže je lehký a snadno se skladuje nebo přepravuje. Chodítka nabízí skvělou ovladatelnost, stabilitu a jeho madla jsou výškově stavitelná pro dobré přizpůsobení uživateli. Výrobek se skládá z práškově lakovaného skládacího rámu z hliníkových kulatých trubek a skládacího kříže. Je také vybaveno látkovým sedákem, který uživateli umožňuje odpočinek a nákupní taškou pro přenášení drobných předmětů.

4 Bezpečnostní požadavky

Ujistěte se, že si tento návod přečtou všechny osoby, které zařízení používají. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a/nebo zranění způsobená tím, že nebyl dodržen návod k použití.



Omezení použití

- Zařízení nesmí být zatíženo více než 200 kg.
- Taška na zařízení má limit zatížení 5 kg.
- Zařízení je navrženo pro použití uvnitř a/nebo venku na rovném povrchu.
- Zařízení není určeno k samohybnému pohybu vsedě.
- PŘED použitím sedáku MUSÍ být brzdy v zajištěné poloze.




Předcházení nehodám

- Používejte zařízení pouze k účelu, pro který je určeno.
- Zařízení používejte pouze v dobrém technickém stavu.
- Neprovádějte na zařízení konstrukční změny, pokud nemáte písemný souhlas výrobce s těmito úpravami.
- Během různých nastavení, která jsou na zařízení možná, musí uživatel dát pozor, aby si neskřípl prsty nebo jiné části těla mezi dva pohyblivé prvky zařízení.
- Zařízení musí být používáno pouze na stabilním povrchu.
- Všechna kolečka MUSÍ být v kontaktu s povrchem PO CELOU DOBU používání. Tím zajistíte, že je chodítka správně vyvážené a zabráníte tím nehodám.
- Při použití chodítka ve stacionární poloze MUSÍ být ruční brzdy zablokovány.

POKUD DOJDE K JAKÉKOLI ZÁVAŽNÉ UDÁLOSTI V OBLASTI ZAŘÍZENÍ, KONTAKTUJTE PROSÍM VAŠEHO PRODEJCE NEBO PŘÍMO SERVIS (kontaktní údaje na konci návodu k použití).


Okamžitá opatření by měla být přijata podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.

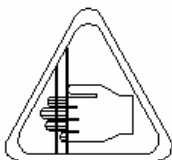

Pozor na prsty

Budte opatrní, když na zařízení uvidíte tento symbol. Během skládání, rozkládání nebo nastavování zařízení mohou být prsty nebo jiné části těla uživatele a/nebo asistenta zachyceny mezi prvky zařízení. Budte velmi opatrní při nastavování zařízení. Dodržujte vzdálenost mezi prvky zařízení, abyste si neskřípl prsty nebo jiné části těla.

5 Detaily výrobku

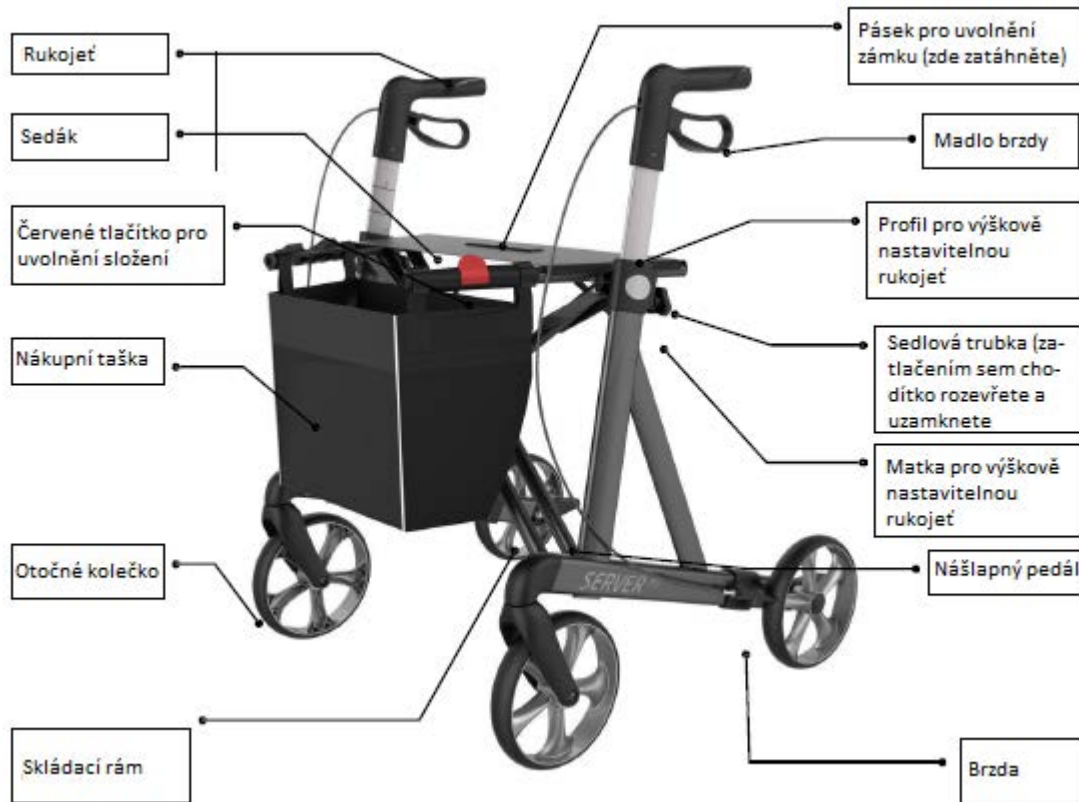

6 Použití

Při pohledu na obrázek výše by mělo být zařízení připraveno k použití instinktivním způsobem. Doporučujeme však postupovat podle následujících kroků:

Počáteční kontrola

- Nejprve vyjměte zařízení z krabice a zkontrolujte (pomocí obrázku výše), že nic nechybí. Pokud v této fázi zjistíte, že některá část chybí nebo je poškozena, nepokračujte v montáži výrobku. Ihned kontaktujte svého dodavatele výrobku.

Rozevření chodítka

- Stiskněte červené tlačítko, které zamyká sedací trubky ve složeném stavu.

- Držte obě sedací trubky a současně je zatlačte dolů, dokud neuslyšíte "cvaknutí" zajišťovacího mechanismu rámu. Zkuste vytáhnout sedací trubky zpět nahoru, abyste složili rám. Pokud to není možné, rám je rozevřen a správně zajištěn. Viz pozici rozložení na obrázku výše.



- Po rozložení nebo montáži chodítka se vždy ujistěte, že sedák je bezpečně zajištěn mechanismem sedacích trubek pro zajištění zámku a že se rám již nepohybuje.
- Vždy se ujistěte, že jsou obě trubky rukojeti bezpečně zajištěny v hlavní nosné trubce pomocí dvou křídlových matek, aby se zabránilo náhodnému zasunutí trubek rukojeti při zatlačení.
- PŘED použitím vždy vyzkoušejte, zda je příslušenství správně a bezpečně zajištěno.
- Nedodržení těchto varování může vést ke zranění osob.

Skládání

- Zatáhněte směrem nahoru za stahovací pásek na sedáku a složte chodítko.
- Složte chodítko tak, aby se zámek zacvakl.

Nastavení výšky rukojeti

- Uvolněte křídlové matky rukojeti.
- Nastavte na požadovanou výšku.
- Utáhněte matky.



- *Obě rukojeti musí být nastaveny na stejnou výšku.*
- *Správně nastavená výška rukojetí by měla odpovídat výšce boků uživatele.*
- *Nikdy nenechávejte zařízení samotné bez zablokování brzd.*

Použití ručních brzd

- K ZASTAVENÍ CHODÍTKA jednoduše přitáhněte madla brzd nahoru k rukojetím.
- ABYSTE ZŮSTALI NA MÍSTĚ držte madla brzd v poloze "NAHORU".
- PRO ZAČÁTEK POHYBU uvolněte brzdová madla. Automaticky spadnou a brzdy se uvolní.



- *Brzdy byste měli aktivovat vždy, když neplánujete pohybovat se zařízením.*
- *Nikdy nenechávejte zařízení bez aktivovaných brzd pokud na něm někdo sedí!*
- *Nikdy nenechávejte zařízení na svazích bez aktivovaných brzd!*
- *Nikdy neseďte příliš vzadu. Neseďte (částečně) nad nákupní taškou.*
- *Sedíte-li na chodítku, vždy sedte vzpřímeně s předloktím nebo rukama lehce položenýma na rukojetích.*
- *Když sedíte na chodítku, nikdy se nenaklánějte dozadu.*

Zamykání/Odemykání ručních brzd

- Chcete-li brzdy úplně zablokovat, zatlačte na brzdová madla směrem dolů, dokud neuslyšíte "cvaknutí".
- Chcete-li brzdy odblokovat, zatáhněte za brzdová madla směrem nahoru, dokud neucítíte, že se uvolňují.



- *Při použití chodítka ve stacionární poloze MUSÍ být brzdy vždy zablokované.*

7 Čištění

Všeobecně:


- Čistěte zařízení pravidelně a udržujte v čistotě.
- Lehčí nečistoty a prach lze odstranit vlhkým hadříkem.
- Větší nečistoty lze odstranit nekorodujícím jemným mycím prostředkem a teplou vodou.
- Nepoužívejte drsná abraziva nebo čistící prostředky na bázi bělidel, protože to může způsobit poškození nebo změnu barvy.
- Jednotlivé části osušte měkkým hadříkem.

Kolečka:

- Očistěte kolečka teplou vodou a jemným čistícím prostředkem. Osušte čistým hadříkem.
- Pravidelně promažte víceúčelovým olejem, nebo pokud začnou kolečka vrzat.

8 Příklad štítku

Štítek výrobku je umístěn na jedné ze spodních trubek hlavního rámu:

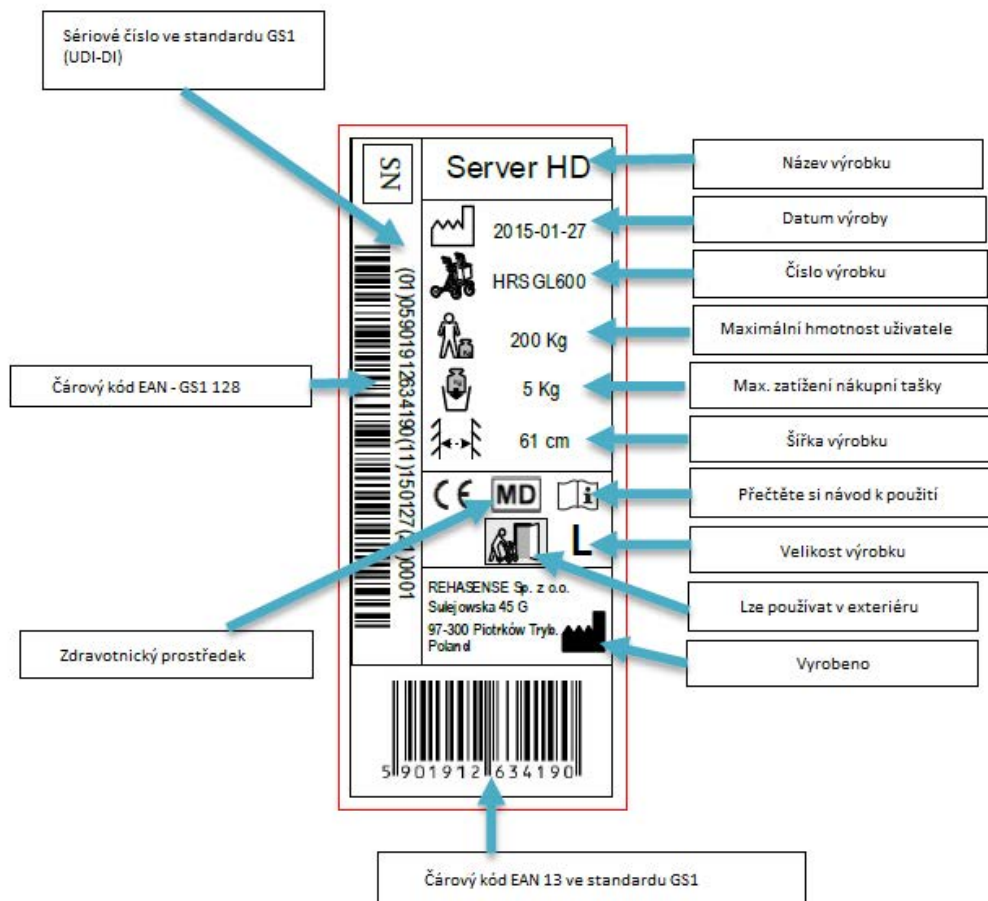

9 Technické údaje

| " SERVER HD" Chodítko pro vyšší zatížení | | |
|--|----------------------------------|-------------|
| Velikost | Medium | Large |
| Max. zatížení | 200 kg | 200 kg |
| Max. zatížení tašky | 5 kg | 5 kg |
| Celková hmotnost bez nákupní tašky | 7,4 kg | 7,9 kg |
| Nákupní taška | 0,4 kg | 0,4 kg |
| Délka | 66 cm | 66 cm |
| Celková výška při složení (nejnižší) | 80 | 86 cm |
| Šířka při rozložení | 69 cm | 69 cm |
| Šířka při složení | 22,5 cm | 22,5 cm |
| Šířka sedáku | 55 cm | 55 cm |
| Výška rukojetí (nastavitelná) | 66 - 86 cm | 74 - 102 cm |
| Výška sedáku | 55 cm | 62 cm |
| Brzdy | 2 ruční brzdy s funkcí parkovací | |
| Kolečka (průměr x šířka) | 20 x 3,5 cm | 20 x 3,5 cm |

10 Popis přepravy.....

Chodítka je jednoduše skládací výrobek, praktický pro přepravu. V případě nutnosti přepravy doporučujeme složit, jak je uvedeno v popisu výše. Chodítka by měla být přepravována tak, aby bylo stabilní a nehrozilo riziko náhlých a nebezpečných pohybů přepravovaného zařízení.

11 Údržba.....

- Zajistěte, aby každá část chodítka byla VŽDY bezpečně zajištěna.
- Zkontrolujte pevné utažení všech šroubů. V případě potřeby dotáhněte.
- Všechny rozbité, poškozené nebo opotřebované díly okamžitě vyměňte.

12 Opětovné použití

Chodítka je vhodné pro opětovné použití. Před předáním jinému uživateli musí být podrobena kontrole odborným prodejcem.

Je třeba zkontrolovat následující:

- Vizuální kontrola rámu
- Bezpečné usazení matic a šroubů
- Stav plastových prvků
- Stav koleček a kuličkových ložisek
- Účinnost a stav brzd

Pokud je některá z částí poškozená nebo zlomená, musí být vyměněna za novou. Při každé výměně se doporučuje vyměnit kolečka. Všechny uvolněné šrouby a matice musí být utaženy. Výrobek musí být před opětovným použitím důkladně vyčištěn a dezinfikován.

POZOR! Je zakázáno znovu používat chodítka, pokud je rám ohnutý nebo zlomený.

Návod k použití musí vždy doprovázet změnu uživatele.

13 Jak výrobek uložit.....

Zařízení by nemělo být likvidováno s běžným odpadem. Mělo by být doručeno do sběrného místa k opětovnému použití nebo recyklaci.

14 Záruka..

Výrobce poskytuje záruku 8 let na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na nesprávné použití výrobku.

V případě technických problémů kontaktujte svého prodejce. Můžete také kontaktovat přímo Rehasense®.

Prodejce:

Rehasense® Sp.z o.o.
Sulejowska 45 G
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com
info@rehasense.com

Rehasense® Europe
Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Nederland

