

**Qmed**<sup>®</sup>  
TO MAKE YOUR LIFE EASIER

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



# Uni Hand

**ORTÉZA NA RUKU A PŘEDLOKTÍ**

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQF3D





## Indikace:

Onemocnění zápěstí, rukou a prstů, která vyžadují podporu a stabilizaci ve specifických polohách, které potíže napravují nebo snižují bolest. Zánět šlach, syndrom karpálního tunelu, revmatický zánět kloubů, preventivní léčba kontraktur, poranění obvodových nervů, operace.

## POZOR!



Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta. Při prvním použití by Vám měl pomoci zkušený zdravotnický personál. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Pokud při používání ortézy cítíte nepohodlí, pozorujete otoky nebo jiné kožní problémy, obraťte se prosím na Vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.

## POZOR!



Nedodržování pravidel osobní hygieny a čištění ortézy nevhodnými čisticími prostředky může mít za následek oděnění kůže nebo jiné problémy spojené s pocením. Nepoužívejte prosím hřejivou mast.

## Jak ortézu nasadit:

Pečlivě vyberte velikost ortézy, abyste zajistili vhodnou a účinnou léčbu. Položte ruku a předloktí na dlahu a zapněte pásy na suchý zip.

1. Pro snazší aplikaci nastavte pásy na nejuvolněnější nastavení.
2. Zasuňte zápěstí a ruku do ortézy.
3. Upravte ortézu tak, aby seděla těsně.

## Údržba:

Ortézu lze po odstranění hliníkové části umýt ručně s pomocí velmi jemných čisticích prostředků při teplotách do 35 °C. Nechlórovat, nečistit chemicky, neždímat a před sušením jemně vymačkat. Sušit mimo umělé zdroje tepla. Sušit v rozloženém stavu. Nesušit v sušičce na prádlo.

## Velikost

Velikost	Obvod zápěstí (cm)	Šířka ruky (cm)
S	12,5 - 15,5 cm	8 cm
M	15,5 - 17,5 cm	9 cm
L	17,5 - 20,5 cm	10 cm





**SPRZĘT  
MEDYCZNY**

**Výrobce:**

**mdh sp. z o.o.**  
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
tel. +48 42 674 83 84  
fax. +48 42 676 71 85  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl), [www.qmedinfo.pl](http://www.qmedinfo.pl)

**Distributor:**

**MEYRA ČR s.r.o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
Česká republika  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)