

## **Děkujeme, že jste si vybrali produkt NAMROL.**

Zakoupené vybavení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby splňovalo vaše současné potřeby a díky vestavěné všestrannosti a přizpůsobivosti i vašim budoucím potřebám. Před použitím tohoto zařízení je dobré si tuto příručku pečlivě přečíst a bezpečně ji uschovat. To vám poskytne úplné pochopení produktu, umožní vám co nejlépe využít její potenciál a zachovat špičkový výkon, bezpečnost a spolehlivost po celou dobu jeho životnosti. A za každých okolností se můžete spolehnout na profesionalitu vašeho NAMROLU, prodejce, odborné znalosti jeho techniků a naše spolehlivost jako konstruktérů.

### **OBSAH:**

VAROVÁNÍ Strana 3

PODOSKOPOVÉ KOMPONENTY Strana 4

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE – strana 5

OBECNÉ POKYNY Strana. 5

TECHNICKÉ SPECIFIKACE str. 6

SYMBOLY str. 6

### **UPOZORNĚNÍ**

Použití stroje je omezeno na pediatry pro konzultaci a diagnostiku nohou. Zařízení je navrženo a vyrobeno pro použití při výrobě protetických vložek.

Nepřekračujte zatížení uvedeno v části Technické pokyny

Neodstraňujte štítky na žádném zařízení

Napájení: Ujistěte se, že zdrojem elektrického napájení elektrické napětí 230 V/16 A, proudový chránič s prahovou hodnotou 10 mA

Klima: Za extrémních podmínek (teplo, chlad, vlhkost) se doporučuje nechat několik hodin v místnosti, čímž se eliminuje případná kondenzace, která by se mohla vytvořit uvnitř balení

### **Podoskop popis**

### **ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:**

K čištění a dezinfekci vnějších povrchů stroje (plastové, lakované a čalouněné části) používejte standardní komerčně dostupné dezinfekční prostředky a zkontrolujte, zda uvedené účinné látky nepřekračují níže uvedené maximální koncentrace:

Glutaraldehyd 2 %10%

Formaldehyd: 0.01%

Propanol: 35%

Ethanol 96 %: 40%

Glyoxal: 0.15%

**VAROVÁNÍ!** Nepřekračujte uvedené koncentrace. Nepoužívejte výrobky obsahující alkohol, amoniak, abrazivní látky nebo benzen. Dezinfikované oblasti otřete vlhkým hadříkem (dezinfekční prostředky mohou napadat povrchy i po zředění), nestříkejte dezinfekční prostředek přímo na zařízení, protože by mohlo dojít k infiltraci jednotky / křesla a ohrožení správné funkce. NAMROL. nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nedodržením varování a pokynů uvedených v této příručce.

### **VŠEOBECNÉ POKYNY**

Udržujte povrch podoskopu a rám neustále čistý, zabraňte hromadění organických usazenin v krytech. Absolutně se vyvarujte nalití tekutin, v případě náhodného nalití vysušte co nejdříve