

Návod k použití – ramenní závěs 208

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám pomůže ortézu správně používat.

Informace o účelu použití

Tento závěs je určen k fixaci ramenního kloubu, odlehčení paže při zlomenině nebo poranění, podpora při rehabilitaci po operaci.

Indikace:

pooperační a poúrazové stavy ruky, předloktí nebo lokte, prevence vzniku bolestivého ramene.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená.

Nasazení:

- Paži vložte do závěsného vaku, aby byla podpořena celá délka předloktí.
- Popruh umístěte přes protilehlé rameno (např. při zranění pravé ruky popruh vede přes levé rameno).
- Nastavte popruh tak, aby paže byla v pohodlné poloze přibližně v úhlu 90°.
- Ujistěte se, že závěs nepůsobí tlak na krk ani podpaží.
- Oblékání / sundávání závěsu zjednodušuje přezka, pomocí které popruh přes rameno jednoduše odepněte nebo připněte a nemusíte zapínat nebo rozepínat suché zipy.



Odložení bandáže:

- Rozepněte přezku a sejměte závěs.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Bandáž skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.



 SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia	MD Medical Device (Zdravotnický prostředek) Materiálové složení: Polyamid, Polyester, PU pěna	Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.
---	--	--