

SANOMED 301 Ortýza zápěstí

Tato ortýza je ideální pro stabilizaci a fixaci zápěstí při různých aktivitách, ať už jde o každodenní činnosti nebo sportovní aktivity.




www.sanomed.cz



<p>Ohlašovací povinnost: Zavazně nezávadoucí přístroj, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>	<p>Medical Device (MD) (Zdravotnický prostředek) Materiálové složení: polyamid, elastan, polypropylen</p>	<p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Česko</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

obvod zápěstí [cm]	velikost
14-18	S/M
18-22	L/XL

Tabulka velikosti a měření

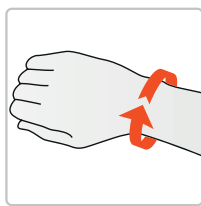

- Vlastnosti:**
- **Prodávňý sendvičový materiál:** Zajišřuje vysokou propustnost potu pro komfortní nošení.
 - **Dlaň v oblasti dlaně:** Perfektní padnutí a optimální podpora zápěstí.
 - **Nastavitelné pásky na suchý zip:** Systém zabráňující vyklouznutí suchých zipů z oček pro bezpečné zapínání.
 - **Snadné navlékání:** Rychlé a jednoduché nasazení ortýzy.
 - **Komfortní celodenní nošení:** Pohodlí i při dlouhodobém používání.
 - **Univerzální použití:** Vhodná pro levou i pravou ruku.

Tato ortýza je ideální pro stabilizaci zápěstí a podporu při různých aktivitách.

Ortýza je navržena pro stabilizaci a fixaci zápěstí díky plastové dlaně. Je ideální pro podporu při každodenních činnostech i sportovních aktivitách.

Návod k použití (CZ)

Ortéza zápěstí 301

Děkujeme, že jste si vybrali naši ortézu. Tento návod vám pomůže ortézu správně používat.

Informace o účelu použití

Tato ortéza je navržena pro fixaci a stabilizaci zápěstí tak, aby poskytla potřebnou podporu a ulevila od bolesti.

Indikace:

Lehké úrazy zápěstí (kontuze, distorze), doléčení po zlomeninách po sejmutí pevné fixace, bolesti při artritidách a artróze zápěstí, entezopatie a záněty šlach v oblasti zápěstí, bolesti při syndromu karpálního tunelu.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím ortézy si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte ortézu na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte ortézu používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je ortéza čistá a nepoškozená. Ujistěte se, že máte správnou velikost ortézy.

Nasazení:

- Uvolněte suché zipy ortézy tak, abyste ji mohli snadno nasadit na zápěstí.

- Vložte ruku do ortézy tak, aby palec prošel otvorem pro palec a zápěstí bylo opřeno o spodní část ortézy, kde se nachází anatomicky tvarovaná dlaha.
- Postupně zapněte suché zipy kolem zápěstí a pak obepněte zápěstí dlouhým elastickým páskem. Upravte utažení podle potřeby tak, aby ortéza pevně držela na místě, ale zároveň neomezovala krevní oběh.
- Po nasazení a utažení ortézy zkontrolujte, zda je ruka pohodlně upevněná a ortéza poskytuje potřebnou podporu.

Odložení ortézy:


Chcete-li ortézu odložit, rozepněte suché zipy a sejměte ji. Pak zipy zapněte, čímž prodloužíte jejich životnost.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Ortézu skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.

 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p>MD Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: polyamid, elastan, polypropylen</p>	<p>Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Vložte ruku do ortézy tak, aby palec prošel otvorem pro palec a zápěstí sa opíralo o spodní část ortézy, kde sa nachádza anatomicky tvarovaná dlaha.

1. Uvolňte suché zipsy ortézy, aby ste si ju mohli ľahko nasadiť na zápästie.

Nasadzovanie:

Ortézu.

Uistite sa, že máte správnu veľkosť ortéza čistá a nepoškodená.

Pred prvým použitím skontrolujte, či je ortéza čistá a nepoškodená.

Pokyny na nasadenie/sňatie ortézy

Vat a poraďte sa s lekárom.

Ak pocítite bolesť, nepohodlie alebo iné veľfajšie účinky, prestaňte ortézu používať a poraďte sa s lekárom.

Nepoužívajte ortézu na otvorené rány alebo podráždenú pokožku.

Pravidelná starostlivosť zabezpečuje optimálny výkon.

Pranie v ruke alebo v pračke pri 30 °C.

Nepoužívajte agresívne prací prostriedky ani bielidla.

Nežehlite ani nesušte v bubnovej sušičke.

Skladovanie

Ortézu skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla. Zabráňte deformácii ortézy tým, že ju nebudete skladať ani preťažovať.

1. Uvolňte suché zipsy ortézy tak, abyste ji mohli snadno nasadit na zápěstí.

2. Vložte ruku do ortézy tak, aby palec prošel otvorem pro palec a zápěstí sa opíralo o spodní část ortézy, kde se nachází anatomicky tvarovaná dlaha.

3. Postupně zapněte suché zipsy ortézy tak, aby palec prošel otvorem pro palec a zápěstí bylo opřeno o spodní část ortézy, kde se nachází anatomicky tvarovaná dlaha.

4. Po nasazení a utažení ortézy zkontrolujte, zda je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potřebnú oporu.

5. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

6. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

7. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

8. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

9. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

10. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

11. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

12. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

13. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

14. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

15. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

16. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

17. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

18. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

19. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

20. Po nasadení a utiahnutí ortézy skontrolujte, či je ruka pohodlně zaistená a ortéza poskytuje potrebnú oporu.

Kontraindikácie: V súčasnosti nie sú známe žiadne.

Pokyny: Čítajte všetky bezpečnostné pokyny.

Nepoužívajte ortézu na otvorené rány alebo podráždenú pokožku.

Pravidelná starostlivosť zabezpečuje optimálny výkon.

Pranie v ruke alebo v pračke pri 30 °C.

Nepoužívajte agresívne prací prostriedky ani bielidla.

Nežehlite ani nesušte v bubnovej sušičke.

Ortézu skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla. Zabráňte deformácii ortézy tým, že ju nebudete skladať ani preťažovať.

1. Uvolňte suché zipsy ortézy, aby ste si ju mohli ľahko nasadiť na zápästie.

2. Vložte ruku do ortézy tak, aby palec prošel otvorem pro palec a zápěstí bylo opřeno o spodní část ortézy, kde se nachází anatomicky tvarovaná dlaha.

3. Postupně zapněte suché zipsy ortézy tak, aby palec prošel otvorem pro palec a zápěstí bylo opřeno o spodní část ortézy, kde se nachází anatomicky tvarovaná dlaha.

4. Po nasazení a utažení ortézy zkontrolujte, zda je ruka pohodlně upevněná a ortéza poskytuje potřebnou podporu.

Chcete-li ortézu odložit, rozepněte suché zipy a sejměte ji. Pak zipy zapněte, čímž prodloužíte jejich životnost.

Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.

Zapněte všechny suché zipy.

Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu.

Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.

Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.

Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.

Nežehlete a nesušte v sušičce.

Ortézu skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.

Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.

Návod na použitie (SK)

Zápästná ortéza 301

Dakujeme, že ste si vybrali našu ortézu. Tieto pokyny vám pomôžu správne použiť ortézu.

Táto ortéza je určená na fixáciu a stabilizáciu zápästia s cieľom poskytnúť potrebnú oporu a úľavu od bolesti.

Indikácie: Drobné poranenia zápästia (pomliaždeniny, distorzie), hojenie po zlomeninách artrotide a artroze zápästia, entezopatie a zápal šlach v oblasti zápästia, bolesti pri syndróme karpálneho tunela.

Kontraindikácie: V súčasnosti nie sú známe žiadne.

Pokyny: Čítajte všetky bezpečnostné pokyny.

Nepoužívajte ortézu na otvorené rány alebo podráždenú pokožku.

Pravidelná starostlivosť zabezpečuje optimálny výkon.

Pranie v ruke alebo v pračke pri 30 °C.

Nepoužívajte agresívne prací prostriedky ani bielidla.

Nežehlite ani nesušte v bubnovej sušičke.

Ortézu skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla. Zabráňte deformácii ortézy tým, že ju nebudete skladať ani preťažovať.

1. Uvolňte suché zipsy ortézy, aby ste si ju mohli ľahko nasadiť na zápästie.

2. Vložte ruku do ortézy tak, aby palec prošel otvorem pro palec a zápěstí bylo opřeno o spodní část ortézy, kde se nachází anatomicky tvarovaná dlaha.

3. Postupně zapněte suché zipsy ortézy tak, aby palec prošel otvorem pro palec a zápěstí bylo opřeno o spodní část ortézy, kde se nachází anatomicky tvarovaná dlaha.

4. Po nasadení a utažení ortézy zkontrolujte, zda je ruka pohodlně upevněná a ortéza poskytuje potřebnou podporu.

Chcete-li ortézu odložit, rozepněte suché zipy a sejměte ji. Pak zipy zapněte, čímž prodloužíte jejich životnost.

Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.

Zapněte všechny suché zipy.

Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu.

Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.

Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.

Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.

Nežehlete a nesušte v sušičce.

Ortézu skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.

Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.