

Duralová dlaha pro fixaci prstů ruky – typ 339

Návod k použití zdravotnických prostředků SANOMED, spol. s r.o.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

přečtěte si prosím pečlivě návod k použití a obraťte se při případných dotazech na svého ošetřujícího lékaře nebo na specializovaný obchod, popř. na náš technický servis. Abychom Vám ulehčili nasazení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. U zdravotnických prostředků doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.

Důležité pokyny:

- Zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis, který musí být nošen dle návodu k použití
- výrobek je určen pro jednorázové použití pacientem.
- při neodborném použití je vyloučena záruka na výrobek.
- na výrobku neprovádějte žádné vlastní úpravy. Při nerespektování může být funkce výrobku omezena.
- pokud zjistíte na sobě neobvyklé změny (např. zhoršení potíží), ihned prosím vyhledejte svého lékaře.
- zabraňte styku výrobku s prostředky obsahujícími tuk a kyseliny, mastí a tělovým mlékem.
- likvidace výrobku smí být provedena bez problémů prostřednictvím domovního odpadu.
- pokud jsou suché zipy na výrobku, je třeba je prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztratí svoji funkci

Popis výrobku:

Dlaha je vyrobena z duralového plechu, vnitřní část je opatřena pěnovou výstelkou. Dlaha se vyrábí ve třech velikostech lišících se délkou.

Rozměry:

Velikost	Délka dlahy (cm)
S	5,3
M	7,8
L	9,0

Datum vydání poslední revize návodu k použití: 24.5.2022

© SANOMED, spol. s r.o., Palackého 75, 612 00 Brno

IČO: 479 101 27 Tel.: 541 422 911



Indikace: fixace nebo stabilizace prvního až třetího článku prstů ruky při pouhazových stavech, doléčení a zklidnění poranění prstu ruky, kontuze v oblasti nehtu, pooperační stavy v oblasti prstů ruky

Použití:

- Dlahy pro univerzální fixaci prstů horní končetiny.
- Snadná aplikace
- Nízká váha, dostatečná pevnost
- Dlahu nasuneme na prst a zafixujeme páskou

Mytí a péče: utírejte pouze vlhkým hadříkem

Pokyny ke skladování:

Skladovat při pokojové teplotě a v suchu. Chránit před přímým slunečním zářením.



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení dlahy způsobené jejím obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb.