



Sanomed 423 **Oboustranný kýlní pás**

Tento pás je praktickým a efektivním řešením pro pacienty s oboustrannou kýlou, kteří hledají pohodlné a snadno použitelné opatření pro prevenci a léčbu kýly v oblasti třísla.



Návod k použití – kýlní tříselný pás 423

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž.

Tento návod vám pomůže pás správně používat.

Informace o účelu použití

Pás je určen pro podporu a prevenci tříselné kýly před a po chirurgickém zákroku.

Indikace:

oboustranná tříselná kýla, předoperační nošení

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Nasazení:

- Před přiložením kýlního pásu kýlu zmenšete. Za tímto účelem doporučujeme se položit na záda a kýlu masírovat.
- Uvolněte všechny suché zipy a přiložte pás kolem kyčlí. Pás zapněte tak, a dobře držel, ale nesmí být příliš těsný.
- Upravte si nastavení a délku stehenních pásků.
- Zkontrolujte, zda peloty (polštářky) jsou řádně umístěny na kýle v poloze ve stoje.
- V případě potřeby upravte utažení

Odložení bandáže:

- Rozepněte suché zipy a sejměte bandáž.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Před praním vyjměte peloty (polštářky) z pásu.
- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všíte etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Bandáž skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída 240/75
612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
40 % bavlna, 20 % latex,
20 % polyester

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.