

Peroneální páska - 722

Návod k použití

Informace o účelu použití

Peroneální páska se používá se při padavé noze, bandáž udržuje kotník v požadovaném úseku v dorzální flexi, čímž poskytuje viditelné zlepšení chůze pacienta.

Pokyny k nasazení:

Peroneální páska udržuje postavení kotníku ve střední poloze a při kroku zvedá špičku, čímž usnadňuje chůzi. Obvod pásy pod kolenem je stavitelný pomocí suchého zipu.

Nasazení:

- Zapněte pásek pod kolenem
- Suchý zip dotáhněte tak, aby neškrtil, ale byl dostatečně pevně uchycen
- Poté zahákněte háček na tkaničky obuvi

Indikace:

padavá noha při parézách (n. fibularis, n. ischiadicus).

Jedná se o zdravotnický prostředek. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Pouze závažné nežádoucí příhody, které mohou vést ke značnému zhoršení zdravotního stavu nebo ke smrti, je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu. Závažné nežádoucí příhody jsou definovány ve článku 2 č.65 nařízení (EU) 2017/745 (MDR).

Pokyny k údržbě:

Suché zipy se před praním musejí sepnout. Perte v pracím přípravku na vlnu, případně v jemném pracím prášku při 30°C, v šetrném pracím režimu, nebo ručně. Důkladně opláchněte a pověste ve vlhkém stavu. Nesušte na topném tělese nebo na přímém slunci. Skvrny nečistěte benzínem ani jinými chemickými čisticími prostředky. Zbytky mýdla mohou vyvolat podráždění pokožky a zvýšit opotřebení materiálu.

Pokyny ke skladování:

Skladujte při pokojové teplotě a v suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením.

UDI-DI: 8595121600000722E7

Made in SANOMED CZ



© SANOMED, spol. s r.o. | 612 00 Brno | Palackého tř. 75 | IČO: 479 101 27 | tel.: 541 422 911

Datum vydání poslední revize návodu k použití: 23.06.2022