

NEURO-LUX®

Ortéza pro funkci ramenního kloubu pro fixaci ramenního kloubu s ochrnutím svalů ramene. Podle Littmanna/Thiela.

Vážený zákazníku,

rádi bychom vás požádali, abyste dodržovali tyto Pokyny k použití s opatrností. Pokud byste měli nějaké dotazy, prosím

konzultujte lékaře, který vás ošetřuje, nebo váš nejbližší sklad, nebo nás kontaktujte přímo.

Funkce:

Specifická fixace ramenního kloubu s volnou funkcí a korekcí subluxace a mediální rotací.

Indikace:

- Hemiplegie
- Zranění plexu
- Trauma lebky/mozku
- Poškození periferních nervů

Kontraindikace:

Obecně řečeno, měli byste se poradit s lékařem, který vás ošetřuje, o indikaci a způsobu nošení ortopedické pomůcky a pokud máte následující stavy:

- Alergické, zánětlivé nebo specifické kožní změny (např. otok, zarudnutí) na tělesných oblastech, které jsou léčeny.
- Poruchy oběhu nebo otoky měkkých lymfatických tkání.
- Neurogenicky specifické orgánové a kožní trofické poruchy v oblasti těla, která je léčena (poruchy smyslového vnímání s a bez poškození kůže). Zatím nebyly hlášeny žádné následné nekompatibility nebo alergické reakce.

Vedlejší účinky:

Dosud nebyly hlášeny žádné zprávy o vážných obecných vedlejších účincích při správném použití a montáži.

Místní tlakové příznaky a poruchy oběhu mohou být s dostatečnou jistotou zabráněny na individuální bázi, pokud se zohlední případné kontraindikace a s nesnadno omezujícím, důsledně tvarovaným přizpůsobením těla.

Nasazení pomůcky:

1. Ramenní objímka A musí být aplikována tak, aby se pohodlně vešla na rameno.

VAROVÁNÍ – Důležité informace pro ortopedické techniky: Při prvním použití ortézy NEURO-LUX® je nezbytné zajistit, aby se termoplastický materiál ramenní objímky A pečlivě ohřál fénem, takže ho lze následně přímo tvarovat na rameno pacienta.

2. Zajišťovací pás 1 je veden na opačné straně pod paži.

3. Pažní manžeta 2 musí být aplikována tak, aby kruhový otvor B ležel nad špičkou lokte. Popruhy C a D jsou vedeny ve směru ramenního kloubu.
4. Pažní manžeta pak obepíná horní a dolní paži.
5. Uzávěry nesmí být příliš utaženy, protože by to mohlo vést k zastavení krevního oběhu. Tomu je třeba zabránit!
6. Propojte spojovací pásy C a D s uzávěry stejné barvy na ramenní čepici.
7. Popruhy musí být lehce napnuté. Ortéza se musí nosit pouze v bdělém stavu, protože v noci mohou vzniknout vředy z tlaku.

Důležité:

Tento výrobek je určen pouze pro použití jedním pacientem.

Neoprávněné úpravy výrobku a/nebo nesprávné používání výše uvedeného výrobku osvobozují výrobce od odpovědnosti za výrobek.

Měli byste diskutovat o potenciálních vzájemných zdravotních rizicích nebo jiných nevýhodách spojených s konkrétními léčbami, které mohou vzniknout v souvislosti s použitím tohoto výrobku, s ošetřujícím lékařem.

Aby výrobek fungoval účinně po delší dobu, neměl by být nošen současně s mastnými nebo kyselými přípravky, mastmi nebo krémy.

Systém řízení kvality společnosti SPORLASTIC GmbH podléhá testování výrobku jako součást našeho systému řízení kvality.

Pokud však máte jakékoli stížnosti ohledně našeho výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo přímo na nás.

Údržba Doporučujeme, aby byl NEURO-LUX® opatrně vyprán vlažnou vodou s pracím prostředkem pro jemné textilie a následně nechat volně uschnout na vzduchu (nenechat schnout na topení).



Qualitätsmanagementsystem
DQS-zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000
und DIN EN ISO 13485:2003
Reg.-Nr. 069305MP23

SPORLASTIC GmbH

Medizinische Produkte

Weberstraße 1 _ 72622 Nürtingen _ Germany
Postfach 14 48 _ 72604 Nürtingen _ Germany

Telefon +49 70 22/70 51 81 _ Fax +49 70 22/70 51 13
info@sporlastic.de _ www.sporlastic.de